




mosquito® Zecken-Karte

Zum einfachen Entfernen von Zecken – praktisch für unterwegs.


Im Falle eines Zeckenstiches sollte die Zecke möglichst schnell entfernt werden. Zwar ist ein Zeckenstich kein akuter Notfall, doch die Gefahr einer Infektion ist real. Zudem steigt das Risiko einer Borreliose-Infektion nach ca. 12 Stunden deutlich an.

Die mosquito® Zecken-Karte hilft beim einfachen und schnellen Entfernen von Zecken. Durch ihr handliches Pocket-Format ist sie praktisch für unterwegs und immer griffbereit. Die integrierte Lupe hilft, die Zecke gut zu erkennen und mit den zwei verschiedenen Einkerbungen können größere oder auch kleinere Zecken entfernt werden.


Anwendung:

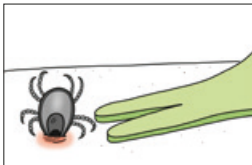

1. Die Einkerbung der Karte unter die Zecke schieben.

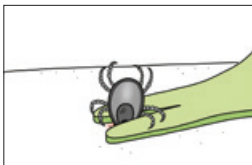

2. Karte vorne leicht anheben und weiterschieben.

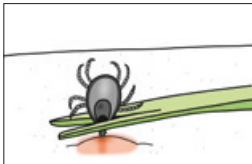

3. Die Zecke wird so gerade aus der Haut herausgezogen.

Wichtig beim Entfernen: Nicht ruckartig reißen und die kleine Wunde nach dem Entfernen der Zecke desinfizieren.



Zeckenkarte
PZN 00677984
Best.-Nr. 044103



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
56204 Hilscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de



PZN -00677984

www.mosquito-parasitenschutz.de