



mosquito® Läusekamm

Das effektive Hilfsmittel zum Erkennen und Entfernen von Kopfläusen und Nissen.

Läusekämme sind spezielle Kämmen, deren Zinken nicht weiter als 0,2 bis 0,3 Millimeter voneinander entfernt sind. Sie dienen als Diagnosehilfsmittel beim Erkennen von Kopflausbefall oder auch zum Entfernen von toten Läusen und inaktiven Nissen nach der Behandlung mit einem Kopflausmittel.

Beim mosquito®-Läusekamm erleichtert eine integrierte Lupe das Erkennen von Läusen im Haar. So leistet der Kamm auch bei der täglichen Nachkontrolle und der Überprüfung des Therapieerfolgs wertvolle Dienste.

Anwendung:

Wir empfehlen zuvor eine Behandlung mit mosquito® med Läuse-Shampoo 10 oder mosquito® Läuse-2in1-Fluid. Den Kamm im noch nassen Haar immer von der Kopfhaut ausgehend nach unten führen:

- Zunächst das Haar in vier Bereiche teilen: Von der Stirn bis zum Nacken und dann von der Mitte aus jeweils bis zum Ohr einen Scheitel ziehen.
- Jeden Bereich nun in feine Strähnen teilen. Dabei immer direkt an der Kopfhaut beginnen.
- Jetzt jede Strähne gründlich durchkämmen, auch hier direkt an der Kopfhaut ansetzen.



- Den Kamm während des Kämmens immer wieder mit einem weichen Tuch oder Watte reinigen. Der Kamm sollte nach jedem Gebrauch mit heißem Seifenwasser (60 °C) oder mit mosquito® Läuse-Waschmittel (schon ab 30 °C) gereinigt werden.

Viele weitere Informationen, Beratungstipps und Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.mosquito-laese.de



Läusekamm
PZN 01873902
Best.-Nr. 044305



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de



PZN - 01873902