


Bepanthen®

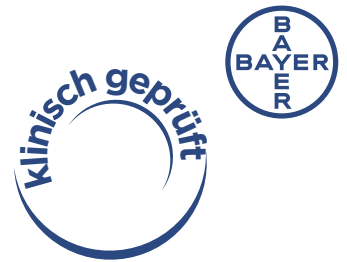

Kühlendes Schaumspray

Was ist Bepanthen® Kühlendes Schaumspray, und wann wird es angewendet?

Bepanthen® Kühlendes Schaumspray ist ein weißer, leichter Schaumfilm in Form einer modernen Nanoemulsion. Als Medizinprodukt ist es zur Behandlung von leichten Verbrennungen oder leichtem Sonnenbrand bestimmt. Durch die sofortige Kühlung und nachhaltige Feuchtigkeitsversorgung unterstützt es den natürlichen Heilungsprozess und lindert Hautirritationen. Der Schaumfilm muss nicht in die Haut einmassiert werden, sondern zieht von alleine ein und gestattet daher eine schmerzlose Anwendung.

Bepanthen® Kühlendes Schaumspray verwenden Sie bei

- leichten Verbrennungen, z. B. durch heißes Wasser, heißen Dampf oder heiße Gegenstände
- leichtem Sonnenbrand durch zu starke oder zu lange Sonneneinwirkung

Was ist unter leichten Verbrennungen/Sonnenbrand zu verstehen, und wie behandelt man diese?

Leichte Verbrennungen und leichter Sonnenbrand sind sogenannte Verbrennungen ersten Grades (oberflächliche Verbrennungen), die nur die oberste Hautschicht (Epidermis) betreffen und keine Blasen bilden. Leichte Verbrennungen – beispielsweise durch heißes Wasser, heißen Dampf oder heiße Gegenstände – sowie leichter Sonnenbrand infolge zu starker oder zu langer Sonneneinwirkung gehen mit den typischen Merkmalen einer Entzündung (Wärme, Rötung und Schwellung der Haut) einher. Die geschädigte Hautpartie schmerzt und fühlt sich trocken und gespannt an. Sofortige Kühlung der betroffenen Haut lindert schmerzhaft empfindungen und kann weitere Zellschäden vorbeugen. Dabei unterstützt die Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit den natürlichen Heilungsverlauf und lindert die Hautreizung.


Wie wirkt Bepanthen® Kühlendes Schaumspray?

Die durch Verbrennung geschädigte Haut benötigt Kühlung und Feuchtigkeit. Bepanthen® Kühlendes Schaumspray wurde gezielt entwickelt, um einen unmittelbaren Kühleffekt zu erzielen und nachhaltig Feuchtigkeit bei leichten Verbrennungen oder leichtem Sonnenbrand zuzuführen.

Der unmittelbare Kühleffekt wird durch die rasche Verdunstung von Wasser aus dem Schaumfilm auf der Hautoberfläche erreicht.

Dank der innovativen Nanosorb®-Technologie, die bei Bepanthen® Kühlendes Schaumspray zur Anwendung kommt, werden die Inhaltsstoffe in Form winziger Tröpfchen (im Nanobereich) bereitgestellt, die den Kontakt mit der Haut verbessern und intensivieren. Dies ermöglicht eine rasche Aufnahme von Feuchtigkeit durch die Haut.

Der kühlende und feuchtigkeitsspendende Effekt hat eine wohltuende Wirkung bei leichten Brandwunden und leichtem Sonnenbrand und hilft, das unangenehme Spannungsgefühl der Haut zu mindern.

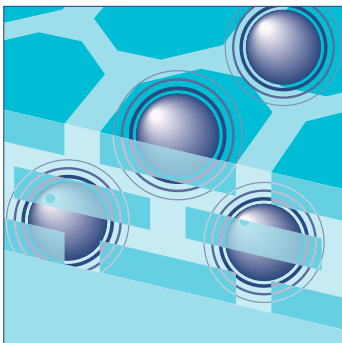

Die Nanosorb®-Technologie führt der geschädigten Haut Lipide sowie Feuchthaltefaktoren zu und unterstützt somit den Aufbau einer gesunden Hautbarriere.

Die Nanoemulsion enthält physiologische Hautlipide sowie Panthenol.

Sie bilden ein feuchtigkeitsspendendes Milieu auf der geschädigten Hautbarriere und unterstützen so den natürlichen Heilungsprozess.

Wie verwenden Sie Bepanthen® Kühlendes Schaumspray?

Bei leichten Verbrennungen:

Verbrennung sofort unter fließendem kaltem Wasser abkühlen. Anschließend Bepanthen® Kühlendes Schaumspray wie folgt auftragen:

Dose gut schütteln. Zum Sprühen Dose aufrecht halten. Betroffene Hautpartie aus ca. 5 cm Abstand besprühen bis sie vollständig mit einem leichten, weißen Schaumfilm bedeckt ist. Einige Minuten warten, bis sich der Schaumfilm aufgelöst hat (er muss nicht in die Haut einmassiert werden). Anwendung bei Bedarf wiederholen. Bleibt die Brandwunde mehrere Tage gerötet oder verschlimmert sich der Zustand, wenden Sie sich bitte unbedingt an Ihren Arzt.

Bei leichtem Sonnenbrand:

Dose gut schütteln. Zum Sprühen Dose aufrecht halten. Betroffene Hautpartie aus ca. 5 cm Abstand besprühen bis sie vollständig mit einem leichten, weißen Schaumfilm bedeckt ist. Einige Minuten warten, bis sich der Schaumfilm aufgelöst hat (er muss nicht in die Haut einmassiert werden). Anwendung bei Bedarf wiederholen. Bleibt die Haut mehrere Tage gerötet oder verschlimmert sich der Zustand, wenden Sie sich bitte unbedingt an Ihren Arzt.

Wann darf Bepanthen® Kühlendes Schaumspray nicht angewendet werden?

Wenn Sie gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe von Bepanthen® Kühlendes Schaumspray überempfindlich sind oder bei Anwendung überempfindlich reagieren, dürfen Sie das Produkt nicht verwenden. Häufig ist es schwierig, einen Sonnenbrand bei Säuglingen und Kleinkindern richtig einzuschätzen. Wir empfehlen Ihnen, in diesen Fällen einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bepanthen® Kühlendes Schaumspray darf während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden.

Während dieser Zeit empfehlen wir Ihnen jedoch, bei großflächigen Verbrennungen einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Welche weiteren Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten?

Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten.

Vor Sonnenbestrahlung oder Temperaturen über 50 °C schützen. Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

Enthält 2,2 Masseprozent entzündliche Bestandteile.

Von 2 °C bis 25 °C lagern.

Nicht auf Schleimhäute oder offene Wunden auftragen.

Bei Anwendung im Gesicht nicht in Augen, Nase, Mund oder Ohren sprühen.

Bei Kontakt mit Augen, offenen Wunden oder Schleimhäuten: kurz mit klarem Wasser spülen.

Nicht einnehmen oder einatmen. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bepanthen® Kühlendes Schaumspray sollten Sie nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Was ist in Bepanthen® Kühlendes Schaumspray enthalten?

Aqua, Panthenol, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Isopentane, Phenoxyethanol, Phosphatidylcholine, Alcohol, Isobutane, Sodium phosphate, Disodium EDTA, Sodium oleate, Disodium phosphate.


Treibgas: Stickstoff (Inertgas).

In welchen Packungsgrößen erhalten Sie Bepanthen® Kühlendes Schaumspray?

Bepanthen® Kühlendes Schaumspray ist in einer 75 ml Spraydose erhältlich.



Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Schweiz

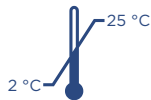

0123

Medizinprodukt



Bayer Austria Ges.m.b.H.
Wien, Österreich

Bayer Vital GmbH
Kaiser-Wilhelm-Allee 70
51373 Leverkusen
Deutschland


Erklärung der Symbole:



Chargen-Nummer



Verwendbar bis

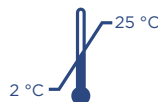

Lagerungstemperatur



Bitte Gebrauchsanweisung
beachten



Hersteller



EU-Bevollmächtigter



Importeur



Vertreiber

Bayer