




Even better than you think

# Selbstklebender, absorbierender Wundverband

Mepore® ist ein luftdurchlässiger, selbstklebender Verband für wenig bis mittelstark exsudierende Wunden. Der hautfreundliche Kleber basiert auf einer Wasseremulsion, ist bindemittelfrei und ermöglicht dadurch eine sanfte und sichere Haftung.

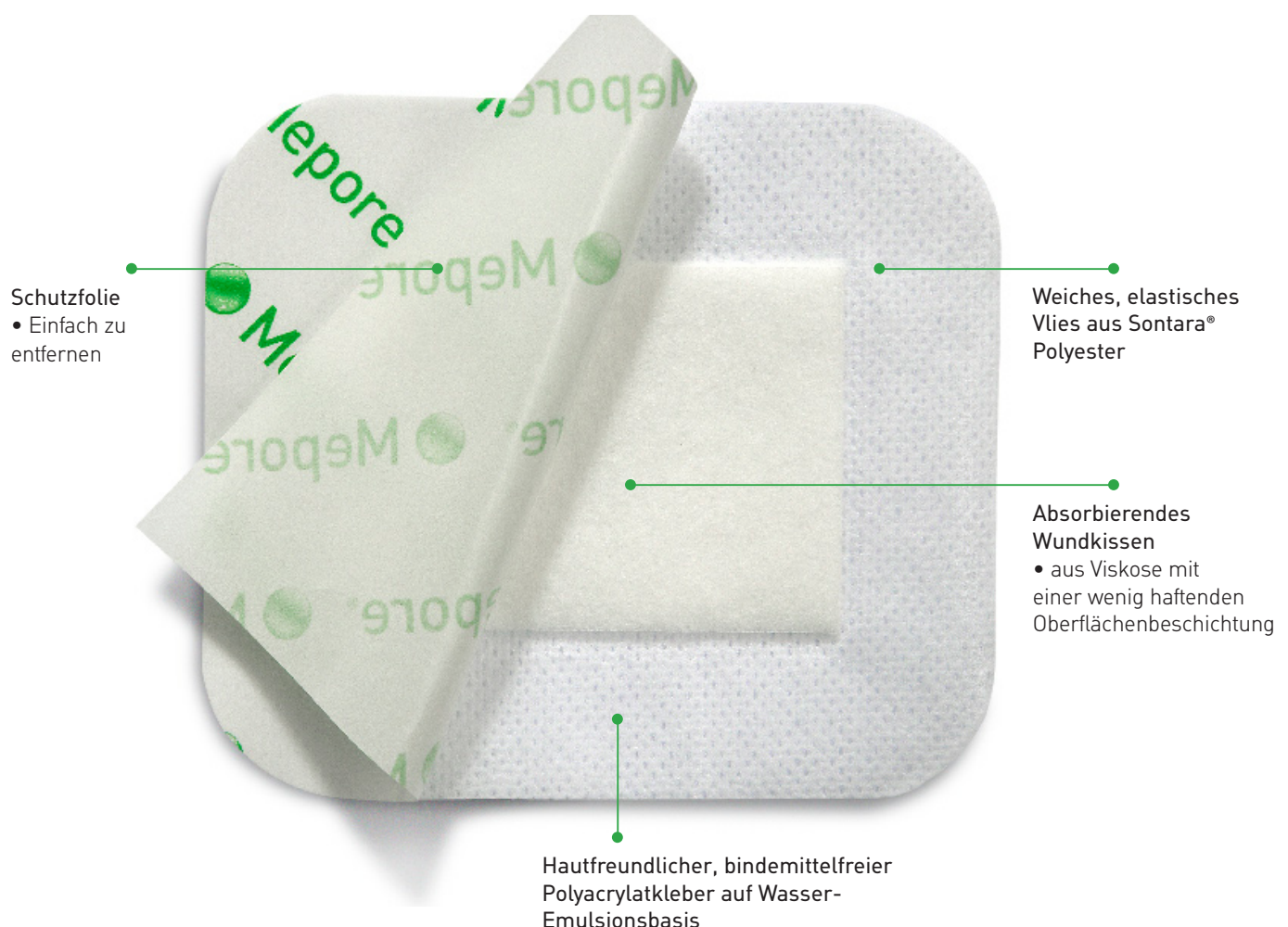

## Anwendungshinweise



Verpackung öffnen und Verband entnehmen.



Die überlappende Schutzfolie in die Hand nehmen und über die Wunde platzieren.



Verband sanft und spannungsfrei auf der Haut anbringen.

## Eigenschaften von Mepore®

Die poröse Struktur des Sontara®-Vliesstoffes stellt die Luft und Wasserdurchlässigkeit sicher. Dieses Material ist dehnbar, anschmiegsam und erlaubt Körperbewegungen. Außerdem ist es nicht absorbierend und verhindert ein Durchnässen. Der Polyacrylat-Kleber gewährleistet ein sanftes Kleben und gleichzeitig eine sichere Haftung. Das Wundkissen kann geringe Mengen von Wundflüssigkeiten aufsaugen und die wenig haftende Oberflächenbeschichtung reduziert das Risiko des Verklebens mit der Wunde. Die einfach zu entfernende Schutzfolie ermöglicht eine sterile Applikation.

## Vorteile von Mepore®

- Hautfreundlicher Kleber auf Basis einer Wasseremulsion
- Wenig haftende Wundkissenoberfläche minimiert Risiko des Verklebens mit der Wunde
- Flüssigkeitsabweisend
- Einfach zu entfernende Schutzfolie ermöglicht problemlose Applikation
- Viele verschiedene Größen
- Abgerundete Ecken (bis 9 x 5 cm) für sicheren Halt

## Anwendungsgebiete

Mepore® kann bei einer Vielzahl von leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden eingesetzt werden z.B. für postoperative chirurgische Wunden, Schnittwunden und Hautabschürfungen.



## Häufigkeit des Verbandwechsels:

Die Häufigkeit hängt vom Zustand der Wunde ab. Der Verband ist von einer Ecke aus einfach zu entfernen.

## Hinweis:

Mepore® soll nicht unter Spannung angebracht werden. Scherkräfte können eine Verletzung der Haut zur Folge haben. Dies ist besonders wichtig bei der Applikation auf Gelenken.

## Mepore ist steril einzeln verpackt.

| Art. Nr. | Größe<br>cm | Größe<br>Wundkissen | PZN<br>Packung | Stück<br>Packung |
|----------|-------------|---------------------|----------------|------------------|
| 670800   | 6 x 7       | 3 x 4               | ---            | 60*              |
| 670900   | 9 x 10      | 4,5 x 6             | ---            | 50*              |
| 671000   | 9 x 15      | 4,5 x 10            | ---            | 50*              |
| 67 07 00 | 7 x 8       | 4 x 5               | 28 39 847      | 55**             |
| 67 15 00 | 10 x 11     | 6 x 6               | 46 08 253      | 40**             |
| 67 16 00 | 11 x 15     | 6 x 10              | 46 08 276      | 40**             |
| 67 11 00 | 9 x 20      | 4,5 x 15            | 31 37 403      | 30               |
| 67 12 00 | 9 x 25      | 4,5 x 20            | 31 37 432      | 30               |
| 67 13 00 | 9 x 30      | 5 x 25              | 31 37 455      | 30               |
| 67 14 00 | 9 x 35      | 5 x 30              | 38 52 732      | 30               |

## Rollen (unsteril)

|          |        |           |   |
|----------|--------|-----------|---|
| 33 19 00 | 4 x 5m | 31 37 478 | 1 |
| 33 20 00 | 7 x 5m | 31 37 484 | 1 |

\* Krankenhaus Sortiment

\*\* Home Care Sortiment