

D Gebrauchsinformationen

SANOHRA swim für Erwachsene mit mittleren Gehörgängen
SANOHRA swim für Kinder und Erwachsene mit kleinen Gehörgängen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel gegen schädlichen Lärm (EN352-2:2020, EU 2016/425). Größe: Ø 7 - 10 mm (Stöpselgröße Mittel) bzw. Ø 6 - 9 mm (Stöpselgröße Klein)


Prüfstelle für Konformitätsbewertung und Überwachung gemäß Modul C2:
PZT GmbH (1974), Bismarckstraße 264B, 26389 Wilhelmshaven, Deutschland.

Hinweis: die Stöpsel müssen in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert, eingestellt und gewartet werden.

Beim Schwimmen, Baden oder Duschen kann Wasser weit in den Gehörgang bis zum Trommelfell eindringen. Dies macht sich durch eine Einschränkung beim Hören bemerkbar.

Feuchtigkeit im Gehörgang lässt den schützenden Ohrenschmalz (*cerumen*) aufquellen und bietet so zusammen mit der Körperwärme einen idealen Nährboden für Bakterien, Keime und Pilze. Entzündungen im Gehörgang und des Trommelfells (*otitis externa*) können die Folge sein. Kinder und Personen mit kleinen Gehörgängen sind besonders betroffen.

SANOHRA swim schützt den Gehörgang und das Trommelfell vor dem Eindringen von Wasser.

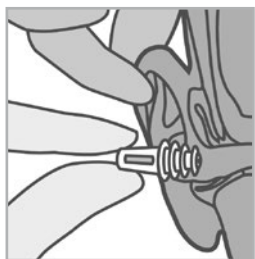

Einsetzen von SANOHRA swim

Einen Arm über den Kopf führen und den oberen Teil der Ohrmuschel des auf der anderen Kopfseite befindlichen Ohres leicht anzuheben. So wird der Gehörgang geweitet. **SANOHRA swim** am Schaft zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand fassen und mit leichter Drehbewegung mit den Lamellen voran in den Gehörgang einsetzen. Bei dem anderen Ohr genau so verfahren.

Herausnehmen von SANOHRA swim

Vor dem Herausnehmen die Ohrmuschel wie beschrieben leicht anheben. Den Ohrenschutz nicht ruckartig herausziehen sondern langsam mit einer leichten Drehbewegung entfernen.

Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Bei Kindern unter 3 Jahren sollte sichergestellt werden, dass der Ohrenschutz ausschließlich von Erwachsenen eingesetzt und auch wieder herausgenommen wird. Die Verwendung des Ohrenschutzes sollte mit dem behandelnden Arzt zuvor besprochen werden. Bei Entzündungen des Ohres, Läsionen des Trommelfells oder dem Einsatz eines Paukenröhrchens fragen Sie zuvor den behandelnden Arzt.

WARNUNG! ERSTICKUNGSRISIKO! KLEINE TEILE. Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Die Gehörschutzstöpsel müssen in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert, eingestellt und gewartet werden.

Warnhinweise zur Verwendung von SANOHRA swim

Achtung: Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise und Einsetzanleitung kann die Schutzwirkung von **SANOHRA swim** gegen Lärm erheblich beeinträchtigt werden. Gehörschutzstöpsel sollten in Lärm Bereichen ohne Unterbrechung getragen werden.

Warnung: Plötzliches oder schnelles Entfernen der Gehörschutzstöpsel aus dem Gehörgang kann das Trommelfell schädigen.

Nicht zum Tauchen verwenden! Der Wasserdruck in größerer Tiefe würde den Stöpsel weiter in den Gehörgang drücken (Nicht mehr als 1 Meter Wassertiefe). Beim Springen ins Wasser oder durch heftige Bewegungen kann der Ohrenschutz verloren gehen! Nach dem Gebrauch **SANOHRA swim** mit klarem Wasser abspülen, um Rückstände wie Salz oder Chlor zu entfernen.

SANOHRA swim kann bei sachgemäßer Pflege wieder verwendet werden. Zur Reinigung kann das Produkt mit mildem Reinigungsmitteln (Seife) gereinigt werden. In regelmäßigen Abständen bitte das Produkt auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden. Es wird empfohlen **SANOHRA swim** nach Gebrauch wieder in dem mitgelieferten Döschen aufzubewahren. Es sollte dabei kühl und trocken gelagert werden. Alle Teile der Gehörschutzstöpsel sind so konstruiert und produziert, dass sie unter Beachtung der Gebrauchsanweisung beim Tragen keine Verletzungen verursachen.

Schalldämmung

Wert /Value [dB]	SNR = 24 dB	H = 23 dB	M = 23 dB	L = 22 dB
Mittelwert	26,5	26,1	26,1	25,4
Standardabweichung	2,6	2,8	3,4	3,9

Frequenz [Hz]	Schalldämmung [dB]	Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	23,4	3,5	19,9
125	26,7	5,6	21,1
250	24,3	4,1	20,2
500	25,6	5,3	20,3
1000	27,2	4,1	23,1
2000	31,3	5,0	26,3
4000	25,5	4,6	20,9
8000	29,9	9,2	20,7

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (CE), EN352-2:2020, EN24869-1. Notified Body PZT GmbH Number: 1974

Erklärung: Hiermit erklärt die Innosan GmbH, dass die PSA SANOHRA swim der Verordnung (EU)2016/425 entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.sanohra.com/downloads>



Hersteller: Innosan GmbH · D-68723 Schwetzingen · Beethovenstraße 3 · Germany
E-Mail: info@sanohra.com · Internet: www.sanohra.com