



mosquito® Zecken-Pinzette

Entfernt auch kleinste Zecken einfach und schnell.

Im Falle eines Zeckenstiches sollte die Zecke möglichst schnell entfernt werden, da das Risiko einer Borreliose-Infektion nach ca. 12 Stunden deutlich an.


Die mosquito® Zecken-Pinzette ist besonders für kleine Zecken geeignet. Mit ihrer filigranen Spitze greift die Pinzette direkt am Stechwerkzeug der Zecke zu, ohne diese zu quetschen.

Auch zum Entfernen von Zecken bei Haustieren ist die Pinzette ideal geeignet.


Anwendung:



1. Die Zecken-Pinzette zwischen Daumen und Zeigefinger halten.

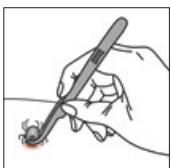

2. Die Pinzette zwischen Körper und Stechapparat der Zecke ansetzen.

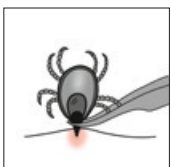

3. Vergrößerung: So sollte die Zecke gefasst werden.



4. Die Pinzette vorsichtig zusammendrücken.



5. Die Zecke gerade herausziehen.

Wichtig beim Entfernen: Nicht ruckartig reißen und die kleine Wunde nach dem Entfernen der Zecke desinfizieren.



Zeckenpinzette
PZN 06129367
Best.-Nr. 044102



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
56204 Hilscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de



PZN -06129367

www.mosquito-parasitenschutz.de