

GenuTrain®

Aktivbandage zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks.

Hilfsmittelnummer:
05.04.01.0006



Indikationen	Merkmale	Wirkweise
• Reizzustände (Tendomyopathie, Ansatzligamentose, Meniskopathie, Arthrose, Arthritis, posttraumatisch und postoperativ) • Instabilitätsgefühl	• Neue Omega-Pelotte: Integrierte viscoelastische, die Patella ringförmig umschließende Pelotte mit zwei Druckpunkten auf dem distalen Pelottenabschnitt und mit zwei seitlichen Flügeln in Höhe der Menisken. • Neues Gestrickkonzept: hochelastisch, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabführend für exzellenten Tragekomfort. • Neuer, besonders weicher und feiner Gestrickbereich in der Kniekehle. • Anatomisches Formgestrick für optimale Passform und sicheren Sitz. • Kompressionsverminderte Randzonen zur Druckausleitung an den Bandagenabschlüssen. • Neue, integrierte Anziehhilfe erleichtert das Anlegen der Bandage.	• Die Omega-Pelotte bewirkt eine Umverteilung der Bandagenkompression von der Patella auf das umgebende Weichteilgewebe. • Bewegungen des Kniegelenks bewirken eine Massage der parapatellaren Weichteilstrukturen durch den sich verformenden Pelottenring. • Kompressions- und Massageeffekte beschleunigen die Resorption von Ödemen und Ergüssen und tragen zur Schmerzlinderung bei. • Die Druckpunkte der Omega-Pelotte üben einen Druck auf den Hoffa'schen Fettkörper aus. Sie wirken druckentlastend und schmerzreduzierend auf den retropatellaren Bereich. • Die seitlichen Flügel der Omega-Pelotte erreichen vordere Anteile der Meniskenlager und tragen über eine Wechselkompression zur Schmerzlinderung bei. • Die komplexe Stimulation von Propriozeptoren durch die Bandage wirkt positiv auf die Sensomotorik und somit auf die belastungssichere Steuerung der Muskulatur.



Omega-Pelotte

Farben

