

WEPA Flächen-Desinfektion

- Schnelldesinfizienz auf Alkoholbasis für Medizinprodukte, sonstige Flächen und Gegenstände
- Bakterizid*, levurozid*, begrenzt viruzid (bei behüllten Viren inkl. Coronavirus), Rota-, Noro-, Adenovirus



Best.-Nr. 040141
1.000 ml
PZN 12669990

Best.-Nr. 040198
500 ml
PZN 14370462

Anwendung:

Unverdünnt anwenden!

Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen (max. 50 ml/m²). Flammpunkt nach DIN 51755: 19,5 °C.

Nicht für alkoholempfindliche Materialien (Lackierungen, Beizungen, Plexiglas u.a.) geeignet. WEPA Flächen-Desinfektion auf die zu desinfizierende Fläche geben, mit einem sauberen Tuch verteilen und das Präparat bis zur Abtrocknung einwirken lassen (empfohlene Einwirkzeit: 1 Minute). Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Überblick:

Flaschengrößen: 500 ml
1.000 ml

BAuA-Reg.-Nr.: N-70857 / N-70860

Empfohlene Einwirkzeiten:

- Begrenzt viruzid** inkl. HBV/HCV/HIV konz. 30 Sek.
- Rota-, Adeno- und Norovirus (MNV) konz. 30 Sek.

**gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 03/2017

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 70 g Ethanol (vergällt)

Hinweise:

- Biozidprodukt
- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
- Verursacht schwere Augenreizungen
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten
- Nicht rauchen
- Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
- Behälter dicht verschlossen halten!
- BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Nach Entfernung eventuell vorhandener Kontaktlinsen weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden
- Packung völlig restenleert entsorgen

* zertifiziert vom VAH Verbund für angewandte Hygiene e.V. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.