

DEBRISOFT LOLLY

DEBRISOFT Lolly

PZN: 13569569

Inhalt: 5 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Der DEBRISOFT® Lolly soll im Rahmen der Wundbettkonditionierung zum Debridement von tiefen - auch chirurgisch invasiven - bis oberflächlichen Wunden verwendet werden. z.B.: diabetische arterielle und venöse Ulzera; Dekubitalulzera; Postoperativ sekundär heilende Wunden; Traumata Verbrennungen/ Verbrühungen Der DEBRISOFT® Lolly wird zur Aufnahme von Exsudat Debris und Hautkeratosen während des Debridements eingesetzt. Hinweis: Das Debridement mit DEBRISOFT® Lolly ist ein Verfahren welches schnell einfach und schmerzarm reinigt und dabei intaktes Gewebe schont.

Zusammensetzung

Der DEBRISOFT® Lolly besteht aus: Stab: Polypropylen Pad: Monofilament-Polyester-Fasern mit einer Innenbeschichtung aus Polyacrylat und einem Röntgenkontrastfaden aus Polypropylen. Das Pad ist mittels eines Nähfadens aus Polyester auf dem Stab befestigt.