

Gebrauchsinformationen

SANOHRA noise/music für Erwachsene mit mittleren Gehörgängen
SANOHRA noise/music für Kinder und Erwachsene mit kleinen Gehörgängen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel gegen schädlichen Lärm (EN352-2:2020, EU 2016/425).
Größe: Ø 7 - 10 mm (Stöpselgröße Mittel) bzw. Ø 6 - 9 mm (Stöpselgröße Klein)


Prüfstelle für Konformitätsbewertung und Überwachung gemäß Modul C2:
PZT GmbH (1974), Bismarckstraße 264B, 26389 Wilhelmshaven, Deutschland.

Hinweis: die Stöpsel müssen in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert, eingestellt und gewartet werden.

SANOHRA noise/music schützt das Trommelfell vor starkem Lärm

Beim Heimwerken, beim Motorsport, auf Partys oder beim Konzert geht es oftmals lauter zu, als es dem Ohr gut tut. Für Spaß und Freude ohne gesundheitliche Risiken wurden **SANOHRA noise/music** Ohrenstöpsel entwickelt. Ein spezielles Filterelement sorgt dafür, dass der Geräuschpegel bei verschiedenen Frequenzen sehr gleichmäßig gedämmt wird. So wird das empfindliche Sinnesorgan Ohr geschützt und Geräusche und Musik können trotzdem unverfälscht wahrgenommen werden. Damit Sie Ihre Ohren wirksam schützen können haben wir einen speziellen Ohrenschutz entwickelt, der folgende Eigenschaften aufweist:

- ✓ **Lärmschutz für Arbeit, Sport und Party**
- ✓ **Gleichmäßige Lärmdämmung bei allen Frequenzen**
- ✓ **Leicht einsetzbar und angenehm zu tragen**

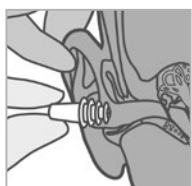

Einsetzen von SANOHRA noise/music

Einen Arm über den Kopf führen und den oberen Teil der Ohrmuschel des auf der anderen Kopfseite befindlichen Ohres leicht anzuheben. So wird der Gehörgang geweitet. **SANOHRA noise/music** am Schaft zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand fassen und mit leichter Drehbewegung mit den Lamellen voran in den Gehörgang einsetzen. Bei dem anderen Ohr genau so verfahren.

Herausnehmen von SANOHRA noise/music

Vor dem Herausnehmen die Ohrmuschel wie beschrieben leicht anheben. Den Ohrenschutz **nicht ruckartig herausziehen** sondern langsam mit einer leichten Drehbewegung entfernen.

Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Bei Kindern unter 3 Jahren sollte sichergestellt werden, dass der Ohrenschutz ausschließlich von Erwachsenen eingesetzt und auch wieder herausgenommen wird. Die Verwendung des Ohrenschutzes sollte mit dem behandelnden Arzt zuvor besprochen werden.

WARNUNG! ERSTICKUNGSRISIKO! KLEINE TEILE. Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Die Gehörschutzstöpsel müssen in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert, eingestellt und gewartet werden.

Warnhinweise zur Verwendung von SANOHRA noise/music

Achtung: Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise und Einsetzanleitung kann die Schutzwirkung von **SANOHRA noise/music** gegen Lärm erheblich beeinträchtigt werden. Gehörschutzstöpsel sollten in Lärmereichen ohne Unterbrechung getragen werden.

Warnung: Plötzliches oder schnelles Entfernen der Gehörschutzstöpsel aus dem Gehörgang kann das Trommelfell schädigen.

SANOHRA noise/music kann bei sachgemäßer Pflege wieder verwendet werden. Zur Reinigung kann das Produkt mit mildem Reinigungsmittel (Seife) gereinigt werden. In regelmäßigen Abständen bitte das Produkt auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden. Es wird empfohlen **SANOHRA noise/music** nach Gebrauch wieder in dem mitgelieferten Döschen aufzubewahren. Es sollte dabei kühl und trocken gelagert werden. Alle Teile der Gehörschutzstöpsel sind so konstruiert und produziert, dass sie unter Beachtung der Gebrauchsanweisung beim Tragen keine Verletzungen verursachen.

Schalldämmung

Wert /Value [dB]	SNR = 24 dB	H = 23 dB	M = 23 dB	L = 22 dB
Mittelwert	26,5	26,1	26,1	25,4
Standardabweichung	2,6	2,8	3,4	3,9

Frequenz [Hz]	Schalldämmung [dB]	Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	23,4	3,5	19,9
125	26,7	5,6	21,1
250	24,3	4,1	20,2
500	25,6	5,3	20,3
1000	27,2	4,1	23,1
2000	31,3	5,0	26,3
4000	25,5	4,6	20,9
8000	29,9	9,2	20,7

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (CE), EN352-2:2020, EN24869-1. Notified Body PZT GmbH Number: 1974

Erklärung: Hiermit erklärt die Innosan GmbH, dass die PSA SANOHRA noise/music der Verordnung (EU)2016/425 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.sanohra.com/downloads>



Hersteller: Innosan GmbH · D-68723 Schwetzingen · Beethovenstraße 3 · Germany
E-Mail: info@sanohra.com · Internet: www.sanohra.com