

NoMIX provisorischer Zahnzement

PZN 13923255 | Art. 84

NoMIX ist ein provisorischer Zahnzement-Mix und eine fertig gemischte Lösung für die vorübergehende Befestigung von Kronen mit temporären oder definitiven Materialien.

Mit starker Haftfähigkeit und einfacher Anwendung ist er ideal für professionelle zahnmedizinische Anwendungen.



NoMIX Provisorischer Zement ist ein feuchtigkeitsaktivierter, weißer, eugenolfreier provisorischer Ein-Komponenten-Zement für das temporäre Einzementieren von Kronen und Brücken. Er dient einer Verwendung von weniger als 30 aufeinanderfolgenden Tagen.

Indikationen

NoMIX Provisorischer Zement kann mit Kronen aus temporären oder definitiven Materialien (Acrylat, Komposit, VMK und Keramik) verwendet werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Den vorbereiteten Zahn feucht lassen.
2. Die Innenflächen der Krone und die trockenen Kronenränder leicht mit NoMIX bedecken.
3. Die Krone einsetzen, auf guten Sitz überprüfen und leicht zubeißen.
4. Nach 5 Min. können Reste des Zementes entfernt werden. Gründlich mit Wasser ausspülen. Falls es nötig sein sollte, die interproximalen Zwischenräume reinigen, indem Sie Zahnseide durchziehen (nicht hochziehen).
5. Nach weiteren 15 Minuten ist der Zement vollständig ausgehärtet. Danach sollten Sie für mindestens eine Stunde nichts essen.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Zinc Oxide, Kalziumsulfat, D.M.T.G. (Glycol), Ethyl Methacrylate Polymer, Triacetin, Potassium Sulfate, NoMIX

Produktinformationen

Abmessungen: 3,10 x 6,50 x 3,10 cm
Artikelgewicht: 0,006 kg
Gewicht mit Verpackung 0,01 kg
Inhalt/Menge: 0,5 g
UVP: 8,69 € inkl. MwSt



Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20