

ALLEVYN HEEL 10.5X13.5 FER

ALLEVYN Heel Schaumstoff Fersenverb.10,5x13,5 cm

PZN: 16222352

Inhalt: 5 St

Hersteller: Smith & Nephew GmbH - Woundmanagement

Zweckbestimmung

15.11.2019 0 16222292 111622229233 05000223461935 66800098 ALLEVYN Ag Heel Schaumstoff
Fersenverband ALLEVYN AG HEEL FERSE VER 5 ST 0 0 0 0 0 180,00 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 24 0 25 0 2 1 0 0 17 137 155 90 125 0
1 1 1 1 1 0 "Nicht haftender antimikrobieller Wundverband aus Polyurethanschaum Beschreibung
ALLEVYN Ag Heel besteht aus einem absorbierenden hydrozellulären Polyurethanschaum, der
Silbersulfadiazin (SSD) enthält und zwischen einer perforierten, nicht haftenden Wundkontaktschicht
und einer wasserdichten, atmungsaktiven Außenfolie eingebettet ist. Der Verband ist eine effektive
Barriere gegen mikrobielle Kontamination und schützt die Wunde gegen invasive pathogene
Mikroorganismen. Das unterstützt eine schnellere Heilung. SSD ist wirksam gegen Mikroorganismen,
die im Verband und in der Wunde zu finden sind. Bei exsudierenden Wunden trägt der Verband zur
Erhaltung eines idealfeuchten Wundmilieus bei." "Indikationen ALLEVYN Ag Heel ist ein
absorbierender, antimikrobieller Verband für die Behandlung sekundär heilender, chronischer und
akuter tiefer, flacher und oberflächlich granulierender und exsudierender Wunden wie zum Beispiel:
Dekubitalulzera, venöse Ulzera, Verbrennungen, Spalthautentnahmestellen, wuchernde/maligne
Wunden und chirurgisch geöffnete Wunden. ALLEVYN Ag Heel kann bei infizierten Wunden
eingesetzt werden. Wird das Produkt auf infizierten Wunden eingesetzt, sollte die Wunden gemäß
dem jeweiligen örtlichen Behandlungsprotokoll behandelt werden. Gegenanzeigen Nicht bei
Patienten verwenden, bei denen Überempfindlichkeit gegen Silbersulfadiazin oder Sulfonamide
bekannt ist. Da Sulfonamide als mögliche Ursache für einen Kernikterus gelten, sollte ALLEVYN Ag
Heel nicht bei stillenden Müttern sowie Frauen am Geburtstermin oder kurz vorher, bei
Frühgeborenen oder Neugeborenen in den ersten Lebensmonate angewendet werden. Für einen
Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung."

15.11.2019 0 16222352 111622235202 05000223461393 66800021 ALLEVYN Heel Schaumstoff
Fersenverband ALLEVYN HEEL 10.5x13.5 FER VER 5 ST 0 0 0 0 0 125,00 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 36 0 25 0 2 1 0 0 17 136 155 90
162 0 1 1 1 1 1 0 "Nicht-haftender Wundverband aus Polyurethanschaum Beschreibung ALLEVYN
Heel besteht aus einem absorbierenden hydrozellulären Polyurethanschaum, der zwischen einer
perforierten nicht haftenden Wundkontaktschicht und einer wasserdichten, atmungsaktive
Außenfolie eingebettet ist." "Indikationen Sekundäre Wundheilung oberflächlicher, granulierender
Wunden. Chronische und akute exsudierende Wunden, oberflächliche oder tiefe Wunden wie zum
Beispiel Druckgeschwüre, Ulcus cruris, infizierte Wunden, diabetische Fußulzerationen, maligne
Wunden, Operationswunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen

und wuchernde Ulcera. Kann bei nekrotischen oder verschorften Wunden in Verbindung mit INTRASITE Gel verwendet werden. ALLEVYN Heel kann im Rahmen eines Druckentlastungsprogramms zusammen mit druckentlastenden Hilfsmitteln unterstützend angewendet werden. Vorsichtsmaßnahmen ALLEVYN Heel nicht gleichzeitig mit Oxidationsmitteln wie Hypochloridlösung (z.B. Eusol) oder Wasserstoffperoxid (H₂O₂) verwenden, da diese die absorbierende Polyurethankomponente des Verbandes zersetzen können. Eine Rötung der Haut um die Wunde nach der Verwendung von ALLEVYN Heel wurde selten berichtet. In einigen Fällen bezieht sich dies auf eine Reizung empfindlicher Haut, in anderen Fällen kann Wundexsudat, das für längere Zeit in Kontakt mit gesunder Haut bleibt, die Ursache dafür sein. Es wurden selten Fälle einer Empfindlichkeit gegen den Verband berichtet. Bei einer Rötung oder Sensibilisierung muss der Gebrauch eingestellt werden. ALLEVYN Heel sollte zur Druckentlastung nicht ohne andere druckentlastende Hilfsmittel verwendet werden. ALLEVYN Heel ist ein Einmalprodukt. Bei einer Anwendung bei mehr als einem Patienten können Kreuzkontaminationen oder Infektionen auftreten. Nicht verwendete Produkte sollten nicht für einen späteren Gebrauch aufbewahrt werden. Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Zusammensetzung

Nicht-haftender Wundverband aus Polyurethanschaum Beschreibung ALLEVYN Heel besteht aus einem absorbierenden hydrozellulären Polyurethanschaum, der zwischen einer perforierten nicht haftenden Wundkontaktschicht und einer wasserdichten, atmungsaktive Außenfolie eingebettet ist.