

252mm

**höga**  
Duschpflaster

- Anwendung:** Die zu behandelnde Stelle sorgfältig reinigen und trocknen. Das Pflaster aus der Peelpackung nehmen.
- Seite mit weißem Trägerpapier:**  
**Wichtig:** Entfernen Sie ein weißes Trägerpapier.
- Anbringen:** Kleben Sie das Pflaster ohne Überdehnung über die gewünschte Stelle und ziehen Sie den Rest vom weißen Trägerpapier ab.
- Seite mit transparenter Folie:** Entfernen Sie die transparenten, in blauer Pfeilrichtung markierten Trägerfolien.
- Pressen Sie einige Sekunden das Pflaster an um ein einwandfreies Anheften zu erzielen.

**Material:** Elastische Polyurethanfolie mit hypoallergenem Polyacrylatkleber. Frei von Latex, PVC und DEHP.

**Verwendung:** Zur Fixierung medizinischer Geräte, zum Schutz der Wunde und der Tätowierung

Steril, wenn Einzelpackungen ungeöffnet und unbeschädigt. Einzel steril verpackt.



**UDI** (xx)xxxxxxxxxxxx  
(xx)xxxxxx  
(xx)xxxxxx  
(xx)xx-xxx-xxx



PZN-16790168



4 017949 011741

CE 0197 REF 16790168 STERILEEO Rev. 01-2025 MD

Yatuo Bio-Technology Co., Ltd., Junfeng Rd., Huangpu District, Guangzhou 510780 Guangdong, CN

Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2395AA, The Hague, Netherlands

IMPORTEUR+VERTRIEB: HÖGA-PHARM, Gulmeringer Str. 17, 93413 Cham, Germany

Tröcken bei -10 bis 45°C vor Licht geschützt lagern.

Medizinprodukt / Medical Device

132mm 15mm

SIZE:132x15x252mm

**höga** Duschpflaster Transparentverband steril

**höga** Duschpflaster

**Transparentverband steril zum Schutz der Wunde**

- wasserdicht
- atmungsaktiv
- elastisch
- hypoallergen
- latexfrei

**steril**

...auch für Tattoo's

3 Stück 10 x 20 cm

3 Stück

**höga** Duschpflaster

Transparentverband steril

3 Stück 10cm x 20cm

