




mosquito® Zecken-Haken

Zum einfachen Entfernen von Zecken – bei Mensch und Tier.


Im Falle eines Zeckenstiches sollte die Zecke möglichst schnell entfernt werden, da das Risiko einer Borreliose-Infektion nach ca. 12 Stunden deutlich ansteigt.

Der mosquito® Zecken-Haken hilft beim einfachen und schnellen Entfernen von Zecken. Zwei Hakengrößen ermöglichen es, größere oder auch kleinere Zecken zu entfernen. Geeignet auch zur Anwendung bei Katzen, Hunden, Pferden etc.


Anwendung:

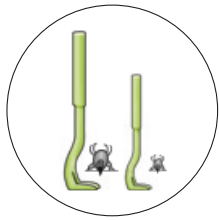

1. Wählen Sie den passenden Haken aus, entsprechend der Zeckengröße.

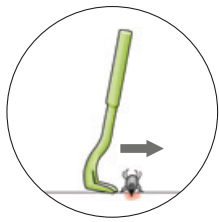

2. Führen Sie die Einkerbung des Hakens von der Seite unter die Zecke.

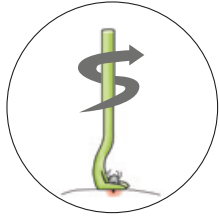

3. Drehen Sie im oder gegen den Uhrzeigersinn bis die Zecke sich löst. Die Einstichstelle anschließend desinfizieren.

Darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen.



Anwendung mosquito® Zecken-Haken als Film



Zecken-Haken
PZN 17184978
Best.-Nr. 044154



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
56204 Hilscheid
www.wepa-apothekenbedarf.de



PZN - 17184978

www.mosquito-parasitenschutz.de