

Domotherm® Medizinische Gesichtsmasken

Typ IIR
Größe: 17,5 cm x 9,5 cm
EN 14683:2019+AC:2019



Medizinische Gesichtsmaske

Schützen Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie

- Bakterielle Filtrationseffizienz (BFE) $\geq 98\%$
- Medizinisch einwandfreie Materialien mit Sicherheitsgarantie
- Formbarer Nasenbügel
- Elastische Ohrschlaufen – Hoher Tragekomfort
- Nicht steril
- Für Erwachsene

Anwendungsbereich:

Medizinische Gesichtsmaske, die Mund und Nase abdeckt und eine Barriere bildet zur Minimierung der direkten Übertragung von pathogenen Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten, Partikeln, etc.

Material und Zusammensetzung:

PP-Vliesstoff (66,7 %), Schmelzgeblasener Vliesstoff (33,3 %), elastische Ohrbänder

Hinweise

Personen, die es nicht gewohnt sind, eine Maske zu tragen und folgende Personen, die das Gefühl haben zu ersticken, sollten die Maske nicht über einen längeren Zeitraum tragen:

- 1) Personen mit Herz- oder Atemproblemen (z. B. Asthma, Emphysem).
- 2) Schwangere Frauen.
- 3) Personen mit Schwindel, Atemnot oder empfindliche Haut nach dem Tragen.
- 4) Kinder unter 3 Jahren.

PZN 17380389
HMV-Nr.: 54.99.01.2001
Art. Nr. 11350

 5R MED Instruments (CHENGDU) Co., Ltd.
Building 9, Section 1, No. 618 of West-Kelin Road, Chengdu Cross-Straits Technology Industry Development Zone, Wenjiang District, Chengdu, China

 ZOUSTECH S.L.

Pso. Castellana, 141-Planta 19,
28046-Madrid, SPAIN



 **Medizin-
produkt**

 **UEBE**
Germany est. 1890

50 Stück



Einfache Anwendung:

1. Halten Sie die Maske mit der Farbschicht nach außen und dem Nasenstück nach oben. Ziehen Sie die Gummibänder hinter die Ohren.
2. Nasenbügel um den Nasenrücken biegen.
3. Fächern Sie die Maske nach unten auf, so dass Nase und Mund vollständig bedeckt sind und die Unterkante unter dem Kinn sitzt.

2021-06

Vertreiber: UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Kulsheim, Deutschland