


Domotherm® Mundschutz FFP2-Masken

Atemschutzmaske mit CE-Kennzeichnung, erfüllt den Prüfstandard EN149:2001+A1:2009 der Schutzklasse FFP2 (PSA = persönliche Schutzausrüstung)

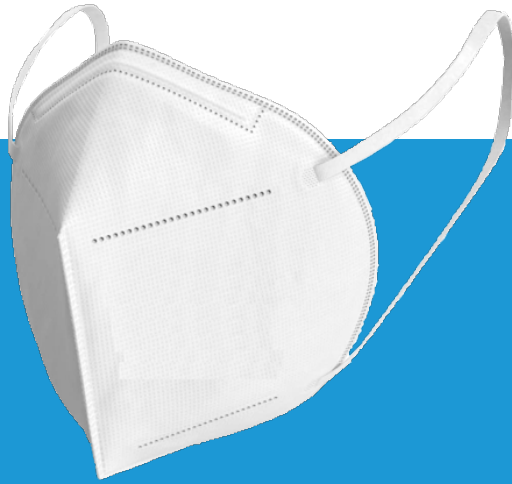

FFP2 ATEMSCHUTZMASKE

Filterierende Halbmaske gegen Partikel

- Schützt vor festen und flüssigen Aerosolen
- Formbarer Nasenbügel
- Elastische Ohrschlaufen – Hoher Tragekomfort
- für Erwachsene

Anwendungsbereich:

Diese Atemschutzmaske ist für den Einsatz zum Schutz vor nicht-toxischen festen und flüssigen Aerosolen geeignet. Nicht außerhalb des in den Warnhinweisen definierten Einsatzbereiches verwenden. Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. FFP2 NR: Filterwirkungsgrad 94%; zugewiesener Schutzfaktor (FPA) ist 10

Vor Gebrauch prüfen:

Überprüfen Sie, ob die Maske unbeschädigt ist und keine sichtbaren Mängel aufweist. Prüfen Sie, ob das Verfallsdatum überschritten ist (siehe Verpackung). Prüfen Sie, ob der Schutzgrad (FFP1 NR/ FFP2 NR/ FFP3 NR) für das verwendete Produkt und dessen Konzentration geeignet ist. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn ein Defekt vorliegt oder das Verfallsdatum überschritten ist.

Warnhinweise

1. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Beschränkungen für die Verwendung dieses Produkts oder das Versäumnis, einen ordnungsgemäßen Sitz zu erreichen, kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. 2. Eine richtig ausgewählte Atemschutzmaske ist für den Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Atemschutzmaske an eine entsprechend qualifizierte Sicherheitsfachkraft, um die Eignung des Produkts für die von Ihnen beabsichtigte Verwendung zu bestimmen. 3. Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie es nur in ausreichend belüfteten Bereichen, in denen genügend Sauerstoff vorhanden ist. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nicht, wenn die Sauerstokonzentration weniger als 19,5 % beträgt. 4. Nicht verwenden, wenn die Schadstokonzentration unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich ist. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer explosiven Atmosphäre. 5. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn: a) das Atmen schwer fällt oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten. 6. Gesichtsbehaarung, Bärte und bestimmte Gesichtsmarkierungen können die Wirksamkeit dieser Atemschutzmaske beeinträchtigen. 7. Verändern oder modifizieren Sie diese Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise (außer wie in der Anleitung angegeben). 8. "NR" bedeutet, dass diese partikelhaltige Halbmaske nicht länger als eine Schicht verwendet werden darf. Es ist keine Wartung erforderlich. Entsorgen Sie die Atemschutzmaske nach Gebrauch oder wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist. 9. Die Verwendungsdauer dieser Atemschutzmaske hängt von den vorhandenen Verunreinigungen ab, sollte aber eine Schicht nicht überschreiten. Die Atemschutzmaske sollte früher ausgetauscht werden, wenn das Atmen schwer fällt. 10. Bewahren Sie die Atemschutzmaske bis zum Gebrauch in der Aufbewahrungsbox vor direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen geschützt auf. Als Lagerungsbedingungen gelten Temperaturen zwischen -30°C bis +70°C und eine relative Luftfeuchtigkeit <80%. 11. Wenn die Atemschutzmaske nicht gemäß der Anleitung angebracht wird, bietet sie nicht das erwartete Schutzniveau. 12. Diese Atemschutzmaske ist für den Schutz gegen nicht-toxische feste und üssige Aerosole geeignet. 13. Ein unzureichender Sitz kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen. 14. Die Atemschutzmasken müssen in der Originalverpackung gelagert und transportiert werden und durch die Lagerung geschützt werden. Die Atemschutzmasken müssen bei der vom Hersteller empfohlenen Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden.


PZN 17380395

Art. Nr. 11300



ARCNOE China Ltd.
Xiyuan Industrial Zone, Qidong Economic
Development Zone (No. 1455, West of
Nanyuan Road), Jiangsu Province, China

EU-Baumusterprüfung Benannte Stelle
Benannte Stelle: SGS Fimko Oy
Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland

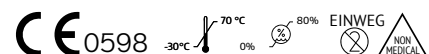

2021-06

Vertreiber: UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Kilsheim, Deutschland



Medizin-
produkt

UEBE
Germany est. 1890