

AQUACEL FOAM N/ADH 15X15CM

AQUACEL Foam nicht adhäsiv 15x15 cm Verband

PZN: 17562854

Inhalt: 5 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

Zweckbestimmung

Aquacel Foam eignet sich als Primär- als wie Sekundärverband. Er kann allein oder in Kombination mit anderen Wundbehandlungsprodukten eingesetzt und passend zugeschnitten werden, wie vom Arzt oder Pflegepersonal angeordnet. Aquacel Foam nicht adhäsiv muss mit einem Heftpflaster oder einem anderen geeigneten Mittel fixiert werden. AQUACEL® Foam sind für folgende Anwendungsfälle angezeigt: - Kleinere Abschürfungen - Risswunden - Kleinere Schnitte - Kleinere Verbrühungen und Verbrennungen AQUACEL® Foam kann in ein Behandlungskonzept zur Vermeidung von Hautschäden eingeschlossen werden Unter medizinischer Aufsicht aan AQUACEL® Foam auch zur Behandlung von akuten oder chronischen Wunden der folgenden Art eingesetzt werden: - Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre (Stadium II-IV) und diabetische Geschwüre - Operationswunden (z.B. postoperative Wunden, die der sekundären Wundheilung überlassen wurden, sowie Spalthautentnahmestellen) - Verbrennungen zweiten Grades - Verletzungen wie Hautabschürfungen und Lazerationen - Exsudierende onkologische Wunden wie z.B. exulzerierende Hauttumoren, Hautmetastasen und Kaposi-Sarkome

Zusammensetzung

AQUACEL® Foam Schaumverband ist ein steriler Hydrofiber® Schaumverband, der aus einer wasserdichten Aussenschicht aus Polyurethanfilm und einem mehrlagigen saugfähigen Wundkissen besteht. Die adhäsiven Ausführungen verfügen über einen Silikonhafterand. Das mehrlagige Wundkissen besteht aus einer Lage Polyurethanschaum und einer nicht-gewebten Wundkontaktschicht aus Hydrofiber® - Technologie (Natriumcarboxymethylzellulose).