

ALLEVYN AG GENT BO 7.5X7.5

ALLEVYN Ag Gentle Border 7,5x7,5 cm Wundverband

PZN: 17830734

Inhalt: 10 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

Zweckbestimmung

Beschreibung Der Wundverband ALLEVYN Ag Gentle Border ist dreilagig aufgebaut: Eine Kombination aus einem absorbierenden hydrozellulären Schaumstoffkern- der Silbersulfadiazin (SSD) enthält- eingeschlossen zwischen einer perforierten, weichen Silikongel-Wundkontaktschicht und einer hoch atmungsaktiven, wasserdichten Außenschicht. Die Wundkontaktfläche von ALLEVYN Ag Gentle Border ist mit einer weichen Silikonschicht versehen, die bei Verbandwechseln eine atraumatische Entfernung gewährleistet. Außerdem kann der Verband angehoben und erneut in Position gebracht werden, ohne hierdurch seine Hafteigenschaft zu verlieren. Der Verband benötigt keine zusätzliche sekundäre Sicherung und lässt sich leicht anlegen und entfernen. Anwendungsgebiete Als absorbierender, antimikrobieller Wundverband dient ALLEVYN Ag Gentle Border zur Behandlung von chronischen, akuten, flachen und tiefen Wunden sowie von granulierenden exsudierenden Wunden wie: Dekubitalulzera, Unterschenkelulzera, Ulzera bei diabetischem Fuß, Verbrennungen, Transplantationswunden, Hautrisse, exulzerierende / maligne Wunden und dehiszente chirurgische Wunden. ALLEVYN Ag Gentle kann bei infizierten Wunden angewendet werden. Bei Anwendung auf infizierten Wunden muss die Überprüfung und Behandlung der Infektion gemäß dem lokalen klinischen Protokoll durchgeführt werden. Bei nekrotischen oder schorfigen Wunden kann ALLEVYN Ag Gentle Border zusammen mit INTRASITE Gel eingesetzt werden. ALLEVYN Ag Gentle Border ist für die Wundversorgung bei empfindlicher Haut geeignet. Kontraindikationen Nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Silbersulfadiazin oder Sulfonamide anwenden. Da Sulfonamide bekanntermaßen eine Bilirubinenzephalopathie (Kernikterus) hervorrufen, darf ALLEVYN Ag Gentle Border nicht bei Frauen in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden. Ebenfalls nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen während der ersten Lebensmonate.

Zusammensetzung

Antimikrobieller hydrozellulärer Schaumverband mit adhäsiven Soft Gel, enthält Silbersulfadiazin (SSD)