

ALLEVYN HEEL FERSENVERBAND

ALLEVYN Heel Schaumstoff Fersenverb.10,5x13,5 cm

PZN: 17830958

Inhalt: 5 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

Zweckbestimmung

Beschreibung ALLEVYN Heel Schaumverband Ferse nicht haftend besteht aus einem absorbierenden hydrozellulären Polyurethanschaum, der zwischen einer perforierten nicht haftenden Wundkontaktschicht und einer wasserdichten, atmungsaktiven Außenfolie eingebettet ist. Indikationen Sekundäre Wundheilung oberflächlicher, granulierender Wunden. Chronische und akute exsudierende Wunden, oberflächliche oder tiefe Wunden wie zum Beispiel Druckgeschwüre, Ulcus cruris, infizierte Wunden, diabetische Fußulzerationen, maligne Wunden, Operationswunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen und wuchernde Ulcera. Kann bei nekrotischen oder verschorften Wunden in Verbindung mit INTRASITE Gel verwendet werden. ALLEVYN Heel Schaumverband Ferse nicht haftend kann im Rahmen eines Druckentlastungsprogramms zusammen mit druckentlastenden Hilfsmitteln unterstützend angewendet werden. Vorsichtsmaßnahmen ALLEVYN Heel Schaumverband Ferse nicht haftend nicht gleichzeitig mit Oxidationsmitteln wie Hypochloridlösung (z.B. Eusol) oder Wasserstoffperoxid (H₂O₂) verwenden, da diese die absorbierende Polyurethankomponente des Verbandes zersetzen können. Eine Rötung der Haut um die Wunde nach der Verwendung von ALLEVYN Heel Schaumverband Ferse nicht haftend wurde selten berichtet. In einigen Fällen bezieht sich dies auf eine Reizung empfindlicher Haut, in anderen Fällen kann Wundexsudat, das für längere Zeit in Kontakt mit gesunder Haut bleibt, die Ursache dafür sein. Es wurden selten Fälle einer Empfindlichkeit gegen den Verband berichtet. Bei einer Rötung oder Sensibilisierung muss der Gebrauch eingestellt werden. ALLEVYN Heel Schaumverband Ferse nicht haftend sollte zur Druckentlastung nicht ohne andere druckentlastende Hilfsmittel verwendet werden. ALLEVYN Heel Schaumverband nicht haftend ist ein Einmalprodukt. Bei einer Anwendung bei mehr als einem Patienten können Kreuzkontaminationen oder Infektionen auftreten. Nicht verwendete Produkte sollten nicht für einen späteren Gebrauch aufbewahrt werden.

Zusammensetzung

Nicht-haftender Wundverband aus Polyurethanschaum