

## **ALLEVYN LIFE 10.3X10.3CM**

### **ALLEVYN Life 10,3x10,3 cm Silikonschaumverband**

PZN: 17830964

Inhalt: 10 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

#### **Zweckbestimmung**

**Beschreibung** Der Wundverband ALLEVYN Life hat einen fortschrittlichen, mehrlagigen Aufbau aus einem mehrschichtigen, hydrozellulären Schaumkissen, welches zwischen einer haftenden, perforierten Wundkontaktschicht aus Silikon-Gel und einer hoch atmungsaktiven äußeren Folie liegt. ALLEVYN Life enthält eine mittig angebrachte, netzartige Abdeckung auf dem Wundkissen, um die Sichtbarkeit des Exsudates einzuschränken. Der ALLEVYN LIFE-Verband unterstützt eine druckentlastende Behandlung, wenn er in Verbindung mit anderen druckentlastenden Maßnahmen angewendet wird. Die Folienschrift hilft eine bakterielle Kontamination der Wunde zu verhindern. Die Außenfolie ist zudem durchfest. Indikationen Wundversorgung von flachen, granulierenden Wunden mit sekundärer Wundheilung, sowie chronischen und akuten, exsudierenden Wunden, flachen und tiefen Wunden wie z.B. Druckgeschwüren, Ulcera cruris, diabetischem Fuß, infizierten Wunden, malignen Wunden, Operationswunden, Wunden durch Verbrennungen ersten oder zweiten Grades, Wunden an Hautentnahmestellen, Hautrissen oder exulzerierenden Wunden. ALLEVYN Life kann bei nekrotischen und belegten Wunden in Verbindung mit INTRASITE Gel angewendet werden. ALLEVYN Life ist auch für die Anwendung auf empfindlicher Haut geeignet. Gegenanzeigen Benutzen Sie den ALLEVYN Life-Verband nicht mit oxidierenden Substanzen wie z.B. einer Hypochloritlösung (z.B. EUSOL) oder Wasserstoffperoxid, da diese die absorbierende Polyurethankomponente des Verbands zerstören kann. Beim Auftreten von Rötungen oder Sensibilisierungen der Haut sollte die Anwendung abgebrochen werden. Schneiden Sie den Verband nicht ein, da innere Bestandteile die Wunden kontaminieren und zu einer verzögerten Heilung führen könnten. Zudem würden die bakteriellen Eigenschaften des Verbands beeinträchtigt werden und es könnte zu einer Infektion kommen. ALLEVYN Life ermöglicht selbst keine Druckentlastung und sollte deshalb immer in Verbindung mit anderen druckentlastenden Hilfsmitteln angewendet werden.

#### **Zusammensetzung**

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silikon-Gel-Beschichtung