

## **SUPRASORB A 10X10CM**

## SUPRASORB A Calciumalginat Kompr.10x10 cm

PZN: 17833750

Inhalt: 10 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

## **Zweckbestimmung**

Anwendungsbereiche stark exsudierende Wunden oberflächliche oder tiefe Wunden in der Exsudations- und Granulationsphase, z. B.: - Druckgeschwüre - arterielle Geschwüre - venöse Unterschenkelgeschwüre - diabetische Geschwüre - Spalthautentnahmestellen Eigenschaften hoher Komfort durch besonders weiche Struktur und einfache Tamponierbarkeit fördert Wundheilung durch hohes Exsudataufnahmevermögen gute Anschmiegsamkeit an jeden Wundgrund (schnelle Gelbildung) Bindung von Bakterien und Zelltrümmern im Gel Hinweise Hinweis bei Infektion: okklusiver Sekundärverband nur nach Entscheidung des Arztes, abhängig von der Gesamtsituation. Suprasorb A sorgt für saubere Wundverhältnisse bei stark exsudierenden Wunden. Verantwortlich ist das hohe Aufnahmevermögen von Calciumalginat aus natürlichen Braunalgen. Suprasorb A ist dabei weich und hervorragend tamponierbar, es schmiegt sich jedem Wundgrund an. Suprasorb A überzeugt durch hohe Exsudataufnahme und schnelle Gelbildung: Durch den Austausch von Calciumionen aus dem Wundverband mit den Natriumionen im Wundexsudat bildet sich ein Gel. Das Exsudat wird gebunden und Bakterien sowie Gewebetrümmer werden eingeschlossen. Beim Verbandwechsel werden Exsudat, Bakterien und Gewebetrümmer mit der Alginatfaser entfernt. Verbandwechselintervall Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5-7 Tagen.

## Zusammensetzung

SUPRASORB A Calciumalginat-Kompressen und -Tamponade bestehen aus: Calciumalginat-Fasern