

AQUA MARIS® CLEAN

100 % natürliches Nasenspray

NASENSPRAY 50 ML, 125 ML I 150 ML

Das isotonische Meerwasser ist reich an Salzen und Oligoelementen, spült Keime und Verunreinigungen weg und fördert eine gute Durchgängigkeit der oberen Atemwege. .

ZUSAMMENSETZUNG

Die Lösung enthält Meerwasser aus der Adria, das reich an Salzen und Oligoelementen ist. Die in der Lösung enthaltenen Oligoelemente spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer guten Funktion der Nasenschleimhaut, wodurch wiederum die Funktion der oberen Atemwege unterstützt wird.

·FREI VON KONSERVIERUNGSTOFFEN.

VERPACKUNGSGRÖSSE

50 ml Lösung in einer Nasenspray-Flasche mit Mikrozerstäuber

125 ml Lösung in einer Nasenspray-Flasche mit Mikrozerstäuber

150 ml Lösung in einer Nasenspray-Flasche mit Mikrozerstäuber

VERWENDUNGSZWECK

Die normale Atmung hängt vom Zustand der Nasenschleimhaut ab. Die Ansammlung von Staubpartikeln, Allergenen, Keimen auf der Nasenschleimhaut beeinträchtigt deren natürliche Funktion. Erkältungen, Allergien, Grippe und eine Reihe anderer Erscheinungen führen zu erhöhter Sekretion, Schwellung der Nasenschleimhaut und Ansammlung von Sekret in der Nase, was die Atmung behindern kann. Meerwasser hat durch seinen Mineralsalzgehalt eine positive Wirkung auf die Schleimhaut der Atemwege.

Wann und wie wendet man das Aqua Maris® Clean Nasenspray an?

Das Aqua Maris® Clean mit einem speziell entwickelten Applikator spült Sekrete, Staubpartikel, Keime und Allergene aus der Nase. Es wird für Personen mit Erkältungen und Allergien empfohlen sowie für Personen, die Staubpartikeln und anderen Verunreinigungen ausgesetzt sind.

Sprühen Sie das Aqua Maris® Clean 1- bis 2-mal in jedes Nasenloch, mehrmals täglich (2- bis 6-mal) oder bei Bedarf auch öfter. Nach dem Auftragen den Applikator ausspülen und trocknen.

Aufgrund seiner milden Formel ist das Produkt auch für den täglichen Gebrauch als Hilfsmittel zur nasalen Durchgängigkeit geeignet.

Das Aqua Maris® Clean hat eine sanfte Wirkung, die den physiologischen Zustand der Schleimhaut unterstützt und keine systemische Wirkung hat. Es ist daher für jeden geeignet, auch für Kinder, Schwangere und stillende Mütter.

Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person verwendet werden; teilen Sie es nicht mit anderen.

Warum probieren Sie nicht auch anderen Aqua Maris® Produkte aus?
Aqua Maris®. Die natürliche Kraft der Adria. Für jedermann. Jeden Tag.

PRODUKTNAME	VERWENDUNGSZWECK	INHALTSSTOFFE
Aqua Maris® Baby Nasentropfen	befeuchtet und reinigt die Nase; geeignet für Babys ab dem ersten Lebenstag	isotonisches Meerwasser
Aqua Maris® Baby Nasenspray	befreit die Nase und entfernt Unreinheiten und Keime aus der Babynase	isotonisches Meerwasser
Aqua Maris® Classic Nasenspray	befeuchtet und reinigt die Nase	isotonisches Meerwasser
Aqua Maris® Refresh Nasenspray	erfrischt, schützt und reinigt	Meerwasser + Lavendel- und Immortelle-Hydrolate
Aqua Maris® Plus Nasenspray	regeneriert die Nasenschleimhaut	Meerwasser + D-Panthenol
Aqua Maris® 4Allergy Nasenspray	lindert Allergiesymptome	Ectoin® 2% + Meersalz
Aqua Maris® Strong Nasenspray	befreit natürlich die Nase	hypertones Meerwasser
Aqua Maris® Thalassotherapy Nasen- und Nebenhöhlenspülung	reinigt die Nasenhöhle und die Nebenhöhlen mit einer Lösung, die wohltuendes natürliches Meersalz und Heilkräuter aus dem Mittelmeer enthält	Neti Pot + 30 Beutel natürliches Meersalz ohne Zusatzstoffe, angereichert mit ätherischen Myrten- und Immortellenölen
Aqua Maris® Thalassotherapy Meersalz mit ätherischen Myrten- und Immortellenölen	Meersalz aus der Adria zur Verwendung mit Aqua Maris® Thalassotherapy, einer Nasen- und Nebenhöhlenspülung	30 Beutel natürliches Meersalz ohne Zusatzstoffe, angereichert mit ätherischen Myrten- und Immortellenölen

Aqua Maris® Grlo
Hals- und Mundspray

lindert Reizungen des Rachens
und der Mundhöhle

hypertones Meerwasser

Aqua Maris® Propolis
Hals- und Mundspray

hilft bei gereiztem und entzündetem
Rachen und reduziert Reizungen
der Mundhöhle

Meerwasser + Propolis-Extrakt

HERSTELLER

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatien

 0373

DAS SYMBOL AUF DEM PRODUKT



Hersteller



CE-Zeichen



Verfallsdatum



Siehe Gebrauchsanweisung



Chargennummer