

# MoliCare® premium lady Pads

## Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

MoliCare® premium lady Pads sind nicht sterile, anatomisch geformte Einlagen für die Handhabung bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche als auch Stuhlinkontinenz. Die Produkte können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Sie können dabei von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen verwendet werden. Die Produkte sind nur zum Einmalgebrauch gedacht und sollten regelmäßig je nach Bedarf gewechselt werden. MoliCare® premium lady Pads sind Medizinprodukte der Klasse I.

## Anwendung/Indikation

Die Produktreihe MoliCare® premium lady Pad dient der Aufnahme von Urin und Stuhl bei Inkontinenz.

*\*nur MoliCare® premium lady Pads 4 – 5 Tropfen.*

## Artikelnummern

Artikel	Artikelnummer*	Stück/Packung
MoliCare® premium lady Pad 0,5 Tropfen	168 056	28 St.
MoliCare® premium lady Pad 1 Tropfen	168 035	12 St.
MoliCare® premium lady Pad 1,5 Tropfen	168 036	12 St.
MoliCare® premium lady Pad 2 Tropfen	168 044	12 St.
MoliCare® premium lady Pad 3 Tropfen	168 045	12 St.
MoliCare® premium lady Pad 4 Tropfen	168 046	14 St.
MoliCare® premium lady Pad 4.5 Tropfen	168 049	14 St.
MoliCare® premium lady Pad 5 Tropfen	168 051	14 St.
MoliCare® premium lady Pad 0,5 Tropfen	168 057	1 St.
MoliCare® premium lady Pad 1 Tropfen	168 058	1 St.
MoliCare® premium lady Pad 1,5 Tropfen	168 059	1 St.
MoliCare® premium lady Pad 2 Tropfen	168 060	1 St.
MoliCare® premium lady Pad 3 Tropfen	168 062	1 St.
MoliCare® premium lady Pad 4 Tropfen	168 063	1 St.
MoliCare® premium lady Pad 4.5 Tropfen	168 064	1 St.
MoliCare® premium lady Pad 5 Tropfen	168 065	1 St.

*\*Möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.*

## Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

# MoliCare® premium lady Pads

## Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sollten die Einwegkomponenten von MoliCare® premium lady Pads gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

## Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

## Leistungsmerkmale des Produkts

Eigenschaften	0,5 Tropfen	1 Tropfen	1,5 Tropfen	2 Tropfen	3 Tropfen	4 Tropfen	4,5 Tropfen	5 Tropfen
Gesamtgewicht [g]	4.2	7.5	9.3	14.4	20.8	32	33.7	38.1
Gewicht Saugkern [g]	2.6	5.4	7.2	11.2	16.2	26.7	28.4	32.8

≤ ± 10 % Maßabweichung

## Materialeigenschaften

Bestandteil	Material
Oberseite	Polypropylen-Polyethylen-Vlies, hydrophil, weiß
Saugkern:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zellstoff* (ausgenommen 0,5 Tropfen)</li> <li>• Superabsorbierendes Polymer (ausgenommen 0,5 Tropfen)</li> <li>• pH-Pufferlösung (ausgenommen 0,5 Tropfen)</li> <li>• Hydrophiles Vlies, weiß (ausgenommen 0,5 Tropfen)</li> <li>• Airlaid (nur für 0,5 Tropfen)</li> </ul>
Rückseite	Atmungsaktive, textilartige Rückseite, weiß
Elastische Teile	Elastische Folie für Beinabschluss (ausgenommen 0,5, 1 & 1,5 Tropfen)
Klebstoffe	Schmelzkraftkleber
Trägerpapier	1 Tropfen, 1,5 Tropfen, 2 Tropfen, 3 Tropfen: Polyethylen-Folie zur Einzelverpackung mit Klebestreifen & Silikonpapier 0,5 Tropfen, 4 Tropfen, 4,5 Tropfen, 5 Tropfen: Silikonpapier

\*elementarchlorfrei gebleicht

## Produkteigenschaften

Abmessungen in mm	0,5 Tropfen	1 Tropfen	1,5 Tropfen	2 Tropfen	3 Tropfen	4 Tropfen	4,5 Tropfen	5 Tropfen
Gesamtlänge	175	220	220	265	335	400	400	400
Gesamtbreite	76	98	98	112	132	162	162	162
Länge Saugkern	145	200	200	233	305	365	365	365
Breite Saugkern	45	78	78	90	112	138	138	138

≤ ± 10 % Maßabweichung

Technisches

# MoliCare® premium lady Pads

## Kennzeichnung

Chargenbezeichnung mit 9-stelligem Code  
z.B.: 300102822

	4	001	02	82	2
	Jahr 202X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer

## Herstellungsdatum

z. B.:  2024 06 02  
Jahr Monat Tag

## Verwendbar bis

z. B.:  2029 06 02  
Jahr Monat Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

## Medizinprodukt



Eindeutige Produktidentifizierung (UDI)



## Trocken aufbewahren



## Nicht wiederverwenden



## CE-Kennzeichnung



Stand der Information: 2024-08-07