

Otri-Natural

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten

Sterile, isotonische Kochsalzlösung mit 0,9 % Natriumchlorid

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie OtriNatural Baby Einzeldosispipetten anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

1 Warum ist eine gründliche Nasenreinigung wichtig?

Die Nasenatmung ist bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen oft durch Schleimansammlung, Krusten und Trockenheit der Nasenschleimhaut eingeschränkt. Eine starke Schleimproduktion kommt besonders häufig bei Babys vor und ist ein Symptom einer verstopften Nase oder einer laufenden Nase. In diesen Situationen hat das Baby, das noch nicht in der Lage ist, Nasensekret durch Schnäuzen zu entfernen, Schwierigkeiten beim Atmen, bei der Nahrungsaufnahme und beim Schlafen und ist dann gereizt und unruhig.

Das Reinigen der Nase mit Kochsalzlösungen kann helfen, eine verstopfte Nase zu verhindern und zu lindern und kann in manchen Fällen dazu beitragen, Komplikationen wie Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) oder Ohrenentzündung (Otitis) zu vermeiden. Besonders in der frühen Kindheit kann diese Reinigung zusammen mit dem Absaugen von Schleim eingesetzt werden.

2 Was ist OtriNatural Baby und wofür wird es angewendet?

Bei OtriNatural Baby Einzeldosispipetten handelt es sich um eine sterile, isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsstoffe.

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten werden empfohlen zur:

- Sanften Reinigung der Nasenhöhlen, wenn die Nase verstopft ist, z. B. bei Erkältungen oder Allergien, durch Ausspülen des überschüssigen Schleims oder der Allergenpartikel wie Staub oder Pollen;
- Befeuchtung der Nasenschleimhaut bei Trockenheit oder Reizung, bei leichten Reizungen der Nase oder aufgrund geringer Luftfeuchtigkeit (z. B. durch beheizte/klimatisierte Räume, große Höhe, Flugreisen);

- Verdünnung und Lösung von Nasensekret, um dieses entfernen zu können.

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten eignen sich besonders zur täglichen Nasenreinigung von Säuglingen, die noch nicht in der Lage sind, sich zu schnäuzen:

- Die tägliche Reinigung löst den Nasenschleim und hilft, überschüssiges Nasensekret zu entfernen, das das Wohlbefinden von Babys beeinträchtigen kann (schlechter Schlaf, Schwierigkeiten beim Essen). Sie hilft ihnen, wieder besser zu atmen und sich besser zu fühlen.
- Im Falle einer übermäßigen Schleimbildung bei der Reinigung der Nasenlöcher von Säuglingen oder Kleinkindern kann unmittelbar nach dem Einträufeln der Lösung ein Nasensauger verwendet werden. Die gleichzeitige Anwendung von einem Nasensauger mit der Kochsalzlösung erleichtert die Entfernung des Schleims aus der Nase und trägt so dazu bei, das Risiko weiterer Komplikationen wie Mittelohrentzündung und Rhinosinusitis zu verringern. Es verbessert auch die Schlafqualität von Babys während einer Erkältung erheblich.

3 Was sollten Sie vor der Anwendung von OtriNatural Baby Einzeldosispipetten beachten?

- ⚠ Vorsicht, vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.
- ⚠ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.

Aufgrund ihrer reinigenden Eigenschaften sollten OtriNatural Baby Einzeldosispipetten bei gleichzeitiger Verwendung eines weiteren lokalen Nasenprodukts (z. B. bei Erkältung oder allergischer Rhinitis) zuerst angewendet werden.

Bei normaler Anwendung, wie angegeben, werden OtriNatural Baby Einzeldosispipetten sehr gut vertragen.

OtriNatural Baby Einzeldosispipetten können während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Wie sind OtriNatural Baby Einzeldosispipetten anzuwenden?

Die übliche Anwendungshäufigkeit beträgt 2- bis 4-mal täglich pro Nasenloch.

Für Säuglinge, Kinder und Erwachsene geeignet. Holen Sie vor der Anwendung bei einem weniger als 2 Wochen alten Säugling ärztlichen Rat ein.

Bei Kindern unter 11 Jahren sollte OtriNatural Baby unter Aufsicht eines Erwachsenen angewendet werden.

Bei älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung kann die Anwendung der Einzeldosispipette die Hilfe eines Erwachsenen erfordern.





Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Kontaminationen ist die Einzeldosispipette für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nur von einer Person verwendet werden. Eine geöffnete Pipette nicht wiederverwenden. Gebrauchte Pipetten müssen entsorgt werden.

Die optimale Anwendungstemperatur ist bei Raumtemperatur (normalerweise zwischen 17 °C und 30 °C).

Anleitung zur Nasenreinigung

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie die Einzeldosispipette öffnen.
2. Schnäuzen Sie sich bei Bedarf.
3. Brechen Sie eine Einzeldosispipette ab und öffnen Sie sie, indem Sie den Deckel abdrehen.
4. Beugen Sie den Kopf nach hinten und platzieren Sie die Spitze der Pipette direkt im Nasenloch.
5. Drücken Sie vorsichtig auf die Pipette, um ein paar Tropfen zu erhalten, oder stärker, wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist. Wiederholen Sie dies im anderen Nasenloch.
6. Warten Sie einige Sekunden und schnäuzen Sie sich bei Bedarf.
7. Bei der Reinigung der Nasenlöcher eines Säuglings oder Babys, das sich nicht schnäuzen kann, sollte ein Nasensauger zum Entfernen von Schleim verwendet werden.
8. Entsorgen Sie gebrauchte Pipetten und waschen Sie Ihre Hände.

5 Zu Ihrer Sicherheit

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern auf.

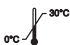
Dieses Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung, nicht zur Injektion.

Bei einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe (siehe Zusammensetzung) das Produkt nicht verwenden. Geben Sie die Lösung nicht in die Augen.

 Keine Einzeldosispipette verwenden, die defekt oder beschädigt ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Melden Sie schwerwiegende Produktvorfälle, die in Zusammenhang mit der Anwendung von OtriNatural Baby auftreten, dem lokalen Hersteller und der zuständigen Behörde vor Ort.

6 Wie sind OtriNatural Baby Einzeldosispipetten aufzubewahren?

 Zwischen 0 °C und 30 °C lagern.

Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum.

Nicht einfrieren.

Einzeldosispipetten in der Originalverpackung aufbewahren.

Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend Ihren örtlichen Anforderungen und berücksichtigen Sie stets die Umwelt.

7 Weitere Informationen

Zusammensetzung: 0,9 % Natriumchlorid und gereinigtes Wasser.

Ohne Konservierungsstoffe.

OtriNatural Baby ist in einer Packungsgröße mit 20 Einzeldosispipetten à 5 ml Lösung erhältlich.

 Haleon CH SARRL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Schweiz



STERILE A



MD

EC REP



Haleon Medical Devices, Clocharane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, X35 Y983, Irland



Vertrieb: Haleon Germany GmbH
80258 München
Tel.: 0800 664 5626
E-Mail: mystory.de@haleon.com

Stand: Juli 2023

Bedeutung der Symbole



Vorsicht



Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Temperaturbereich bei Lagerung



Hersteller

EC REP

Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft



Nicht zur Wiederverwendung

STERILE A

Unter Verwendung aseptischer Techniken sterilisiert.



Verwendbar bis

LOT

Chargenbezeichnung



Importeur



Vertrieb

MD

Medizinprodukt

Marken sind Eigentum von oder lizenziert an Haleon.

© 2024 Haleon oder Lizenzgeber