

# Otri-Natural

## OtriNatural Schnupfenspray Hyperton, 2,3 % NaCl

OtriNatural Schnupfenspray ist ein 100 % natürliches, klinisch geprüftes, abschwellendes Nasenspray. Die hypertone Meerwasserlösung (2,3 % NaCl) ist reich an den wohltuenden Inhaltsstoffen des Meeres (Mineralsalze und Spurenelemente). OtriNatural Schnupfenspray lindert die verstopfte Nase und reduziert den Druck in den Nebenhöhlen durch den natürlichen Mechanismus der Osmose. Darüber hinaus reinigt OtriNatural Schnupfenspray die Nasenhöhlen und entfernt angesammelten Schleim, Krusten, Staub, Schmutz, Schadstoffe, Allergene und Krankheitserreger. Zusätzlich hilft es, die Nasenschleimhaut zu befeuchten.

Das in OtriNatural Schnupfenspray verwendete Meerwasser wird aus der Bucht von Cancale an der Küste der Bretagne in Frankreich gesammelt. Die Gegend ist bekannt für ihre offenen Meere und starken Gezeitenströmungen und steht für Meerwasser von herausragender Qualität, reich an Mineralsalzen und Spurenelementen. Die Qualität des Meerwassers wird kontinuierlich vom französischen Forschungsinstitut für Meeresnutzung (IFREMER) unter der Schirmherrschaft der französischen Regierung überwacht.

OtriNatural Schnupfenspray ist Wirkstoff-frei, frei von Konservierungsstoffen und chemischen Zusätzen.

OtriNatural Schnupfenspray kann alleine als natürliche Alternative zu abschwellenden Arzneimitteln (lokale Kortikosteroide, Antihistaminika, Vasokonstriktoren) verwendet werden oder in Kombination mit diesen, um deren Wirksamkeit zu verbessern. In Kombination kann es dazu beitragen, die Dauer der medikamentösen Behandlung zu verkürzen und die Menge der eingenommenen Arzneimittel zu reduzieren.

### Eigenschaften:

- Lindert die verstopfte Nase durch Abschwellen der Nasenschleimhaut (über Osmose).
- Verflüssigt Nasensekret und erleichtert dessen Ausscheidung.
- Hilft, die natürliche Funktion der Nasenschleimhaut wiederherzustellen.
- Reinigt die Nasenhöhlen von angesammeltem Schleim, Krusten, Staub, Ablagerungen, Schadstoffen, Allergenen und Krankheitserregern.
- Befeuchtet die Nasenschleimhaut und lindert Nasentrockenheit.

OtriNatural Schnupfenspray verbessert die Lebensqualität, indem es Symptome lindert, die mit einer verstopften Nase in Verbindung stehen (z.B. juckende Nase, Niesen, Husten, Druck in den Nebenhöhlen und Ohren, Schlafstörungen).

OtriNatural Schnupfenspray wird empfohlen:

- Bei verstopfter Nase und verstopften Nebenhöhlen, z. B. bei Rhinitis (infektiös oder allergisch), Sinusitis; bei Erkältung und Grippe.
- Wenn abschwellende Arzneimittel kontraindiziert sind (z. B. während der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Erkrankungen der Schilddrüse, bei Bluthochdruck, bei Herzerkrankungen, bei Diabetes).

- Zur Verbesserung der Wirksamkeit von abschwellenden Arzneimitteln und um deren Gebrauch zu reduzieren.
- Zur Prophylaxe von Naseninfektionen und sekundären HNO-Infektionen sowie deren Komplikationen, z. B. Otitis.
- Zur Förderung der Genesung nach endonasalen Operationen.
- Für die tägliche Nasenhygiene (z. B. in verschmutzter Umgebung).
- Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut in trockener Umgebung.

### Beschreibung:

30 ml Nasenspray, ohne Konservierungsstoffe, für jeden geeignet, einschließlich Babys.

### Zusammensetzung:

Meerwasser 70 %, gereinigtes Wasser 30 %, entspricht 23 g/l NaCl (2,3 %). Ohne Konservierungsstoffe. Wirkstoff-frei. Ohne chemische Zusätze. 100 % natürlich.

### Empfohlene Dosierung:

Verwenden Sie das Spray wie unten angegeben oder nach Anweisung Ihres Arztes.

Babys ab 0 Monaten: 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2- bis 3-mal täglich.

Alle, einschließlich Babys ab 6 Monaten: 1-3 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2- bis 3-mal täglich.

### Vorsichtsmaßnahmen:

Nur zur Anwendung in der Nase. Nicht von mehr als einer Person zu verwenden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Überempfindlichkeit gegen Meerwasser nicht verwenden.

**Hinweis:** Zu Beginn der Anwendung kann eine leichte und vorübergehende Reizung auftreten.

### Aufbewahrungshinweise:

Nicht über 25 °C lagern. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen.

Geeignet während der Schwangerschaft und Stillzeit.

OtriNatural Produkte sind Medizinprodukte, die den Anforderungen der Richtlinie 93/42 der Europäischen Gemeinschaft entsprechen.

### Gebrauchsanweisung:

#### Erwachsene & Kinder:

1. Schnäuzen Sie die Nase, um das Nasensekret zu entfernen, bevor Sie OtriNatural Schnupfenspray verwenden.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe.
3. Halten Sie die Sprühflasche aufrecht und betätigen Sie die Sprühpumpe mehrmals, um sie zu aktivieren.
4. Beugen Sie sich über ein Waschbecken und neigen Sie den Kopf sanft nach rechts.
5. Führen Sie den Sprühkopf vorsichtig parallel zum Nasenseptum in das linke Nasenloch ein und betätigen Sie die Sprühpumpe kräftig.
6. Drehen Sie den Kopf zur anderen Seite und wiederholen Sie die Anwendung im anderen Nasenloch.
7. Entfernen Sie den Sprühkopf aus dem Nasenloch, richten Sie sich auf, lassen Sie die Lösung einige Sekunden einwirken und schnäuzen Sie dann die Nase.
8. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
9. Waschen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser ab und wischen Sie ihn trocken.



### **Babys & Kinder, die Hilfe benötigen:**


1. Säubern Sie die Nase des Babys bevor Sie OtriNatural Schnupfenspray verwenden.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe.
3. Halten Sie die Sprühflasche aufrecht und betätigen Sie die Sprühpumpe mehrmals, um sie zu aktivieren.
4. Legen Sie das Baby in Rückenlage und drehen Sie seinen Kopf sanft nach rechts.
5. Führen Sie den Sprühkopf vorsichtig in das linke Nasenloch ein, parallel zum Nasenseptum, und betätigen Sie die Sprühpumpe kräftig.
6. Drehen Sie den Kopf sanft zur anderen Seite und wiederholen Sie die Anwendung im anderen Nasenloch.
7. Entfernen Sie den Sprühkopf aus dem Nasenloch des Babys, bringen Sie das Baby in eine aufrechte Position, lassen Sie die Lösung einige Sekunden einwirken und wischen Sie dann die Nase sauber.
8. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
9. Waschen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser ab und wischen Sie ihn trocken.



Gerolymatos International S.A.  
8 Asklipiou St.  
14568 Kryoneri, Athen  
Griechenland

### **Vertrieb:**

Haleon Germany GmbH  
80258 München  
Tel.: 0800 664 5626  
E-Mail: [mystory.de@haleon.com](mailto:mystory.de@haleon.com)

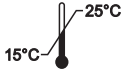

Marken sind Eigentum der Haleon Unternehmensgruppe oder an diese lizenziert.  
© 2024 Haleon oder Lizenzgeber