

Domotherm® SPRÜH & WISCHDESINFEKTION plus

Desinfektion
500 ml e



Flächendesinfektion
ohne Sprühspender

500 ml e

Domotherm SPRÜH & WISCHDESINFEKTION plus

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion

In 100g sind enthalten:
20,0g 1-Propanol; 5,0g
2-Propanol.
VO 648/2004/EG:
Enthält Duftstoffe

- Sehr materialschonend
- Gebrauchsfertige und stark alkoholreduzierte Schnelldesinfektion
- Aldehydfrei, Phenolfrei
- Begrenzt viruzid PLUS

Zweckbestimmung: Als Medizinprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten. Als Biozidprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von kleineren Flächen. Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn) ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten: Geeignet zur prophylaktischen Wischdesinfektion von Medizinprodukten wie z.B. dentalen Behandlungseinheiten, Krankenbetten, Blutdruckmessgeräte, Venenschläuche etc. Zur Wischdesinfektion ein nach EN 16615 geprüftes Tuch mit der Desinfektionslösung tränken und die Flächen abwischen. Alternativ die Lösung direkt auf die Fläche geben und anschließend mit dem betreffenden Tuch wischen.

Desinfektion von Oberflächen: Zur Wischdesinfektion von kleinen Flächen ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach wischen.

Hinweise zur Anwendung: Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig mit der Desinfektionslösung benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Gute Materialverträglichkeit gegenüber alkoholempfindlichen Materialien. Auch zum Tränken von kompatiblen und mit der Wischdesinfektion geprüften Vliestuch-Rollen geeignet. Es ist in diesem Anwendungsfall die geforderte Tränkmenge des jeweiligen Vliesmaterials zu beachten. Die Verwendung ist nur für professionelle Anwender vorgesehen.

Einwirkzeiten bei der Desinfektion von kleinen Flächen in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen: BBakterien und Candida albicans nach EN 1276, EN 13697 und EN 1650 (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Einwirkzeiten bei der Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Bereich: Bakterien und Candida albicans nach EN 13727, EN 13624, EN 16615, VAH (hohe Belastung): Konz. 1 min., TbB (Tuberkulose)- Erreger (M. terrae) und Mycobakterien (M. avium) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 1 min., „Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV gemäß EN 14476, hohe Belastung): Konz. 1 min., „Begrenzt viruzid Plus“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV und Noro-, Adeno- und Rota-Viren) nach EN 14476 (niedrige Belastung): Konz. 1 min., Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung): Konz. 1 min.

Sicherheitshinweise: H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P 210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P 280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P 305 + P 351+ P 338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 337 + P 313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P 403 + P 233 An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen. VO 648/2004/EG: Enthält Duftstoffe.

Hinweise zu Vorkommnissen: Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


UFI: WWOU-0X2W-W109-C3GY
BAuA Reg-Nr. N-82353
HMV-Nr.: 54.99.02.0002

PZN 19720866
Art. Nr. 1150005

 PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0



2024-12

 UEBE Medical GmbH
Bgm.-Kuhn-Straße 22
97900 Kilsheim, Deutschland



CE 0124 0°C 40°C

 UEBE
Germany est.1890