

Biatain Silicone Schaumverband



Gebrauchsanweisung

23318310 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. ©
2016-08-19

Indikationen

Das Produkt ist für die feuchte Wundbehandlung indiziert.

Biatain Silicone

- ist für ein breites Spektrum an mittel bis stark exsudierenden Wunden indiziert. Dazu zählen u.a. akute Wunden wie Hautentnahmestellen, postoperative Wunden und traumatische Wunden sowie chronische Wunden wie z.B. Ulcus cruris, Dekubitus und nicht infektiöses diabetisches Fußsyndrom.
- kann bei den indizierten Wunden über den gesamten Wundheilungsprozess eingesetzt werden, um sie zu schützen.
- kann zur Verhinderung einer postoperativen Blasenbildung verwendet werden

Informationen

Bei dem Produkt handelt es sich um einen sterilen Polyurethan-Schaumverband mit Silikonhaftung für den Einmalgebrauch.

Biatain Silicone

- kann je nach Exsudatmenge, Verbandzustand und Art der Wunde bis zu 7 Tage lang auf der Wunde verbleiben.
- kann zusammen mit Purilon Gel für das autolytische Débridement von nekrotischem Gewebe verwendet werden
- kann nach Ermessen des Arztes bei Patienten mit lokaler oder systemischer Infektion eingesetzt werden
- ist für den Einsatz unter Kompression geeignet.

Das Produkt besteht aus:

- einem semipermeablen Schutzfilm, der wasser- und bakterienabweisend ist
- einem Superabsorberdepot
- einer saugfähigen Polyurethan-Schaumschicht
- einer perforierten weichen Silikon-Wundkontaktschicht.
- türkisen Schutzfilmen

Falls Sie den Verdacht auf eine allergische Reaktion oder sonstige Nebenwirkungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder das behandelnde medizinische Fachpersonal.

Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Wichtige Hinweise

Diabetische Wunden, infizierte Wunden sowie ganz oder teilweise durch arterielle Insuffizienz entstandene Wunden sollten gemäß den relevanten Richtlinien regelmäßig von einem Arzt bzw. einer dafür ausgebildeten Fachkraft überprüft und behandelt werden.

Das Produkt nicht mit oxidierenden Lösungen wie z. B. Hypochlorit- und Wasserstoffperoxidlösungen verwenden. Vor Anlegen des Verbands sicherstellen, dass alle anderen Flüssigkeiten vollständig getrocknet sind.

Den Schaumteil des Produkts nicht schneiden.

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Warnhinweise

Die Wiederverwendung dieses Einwegprodukts kann die Gesundheit des Patienten potenziell gefährden. Die Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und/oder Sterilisation kann die Produktmerkmale beeinträchtigen und somit ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Patienten darstellen.

Anwendung

Vorbereiten


Die Wunde und den Wundrand gemäß den gültigen Richtlinien reinigen, z.B. mit Ringelösung, physiologischer Kochsalzlösung oder sterilem Wasser.

Die Wundumgebung vorsichtig trocknen.

Wenn ein Film, eine Creme, eine Salbe oder ein ähnliches Produkt verwendet wird, den Wundrand trocknen lassen, bevor das Produkt angebracht wird.


Anwenden

Ein Produkt wählen, dessen Schaumkissen die Wundränder um ungefähr 1 bis 2 Zentimeter überlappt.

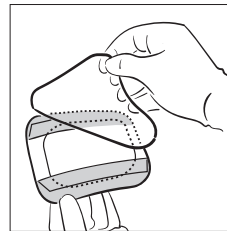


Die Schutzfolien verwenden, um Berührungen der selbsthaftenden Seite zu vermeiden und eine aseptische Applikation zu gewährleisten.

Die mittlere Schutzfolie entfernen.

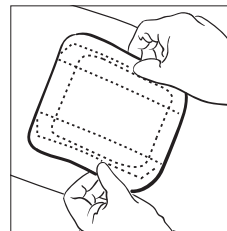

Die selbsthaftende Seite Richtung Wunde auflegen. Die restlichen Schutzfilme nacheinander entfernen.

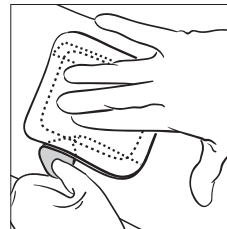

Mit den Fingern vorsichtig um den Rand des Produkts herumfahren, um sicherzustellen, dass das Produkt gleichmäßig und glatt sitzt.

Entfernen

Das Produkt sollte gewechselt werden, wenn ein Wechsel klinisch indiziert ist, wenn sich das Exsudat sichtbar dem Rand des Schaumstoffs nähert oder spätestens nach 7 Tagen. Den selbsthaftenden Rand lösen, bevor das Produkt von der Wunde abgehoben und entfernt wird.

Entsorgen

Das Produkt ist für den Einmalgebrauch vorgesehen und sollte gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Symbole



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.



Ohne Naturkautschuklatex hergestellt