

Stop Hémopuder-Spray (PZN19848253)

Beipackzettel



ANWENDUNG:

- 1 Wunde mit Seife und Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung (NaCl 0,9%) reinigen.
- 2 Sprühflasche ein paar Sekunden lang kräftig schütteln.
- 3 In einem Abstand von 5 - 10 cm zur Wunde sprühen. *Der Abgabedruck und das Kältegefühl können überraschend sein. Sie werden durch das Treibgas verursacht.*
- 4 Sprühkopf mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen und Sprühflasche dicht verschließen.

Wunde bei Bedarf mit einem Verband abdecken. Puder nicht von der Wunde abnehmen, da es sich mit der Kruste von selbst löst.

GEFAHR. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

N2800S-S - Oktober 2021

Stand: 31.07.2025