




# Mölnlycke®

## Mepilex® Border Flex Lite

WITH SAFETAC®-TECHNOLOGY

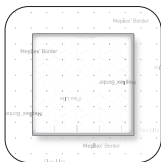

**STERILE EO**



Single use  
Usage unique



See instructions for use  
Voyez le mode d'emploi



Keep dry  
Conserver au sec


CE 2797

Manufacturer / Fabricant




Mölnlycke Health Care AB  
Gamlestadvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

## Mepilex® Border Flex Lite < 15x15 cm / 6x6 in

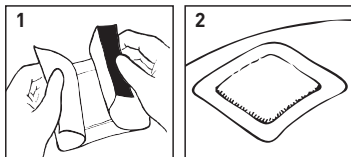

## Mepilex® Border Flex Lite ≥ 15x15 cm / 6x6 in

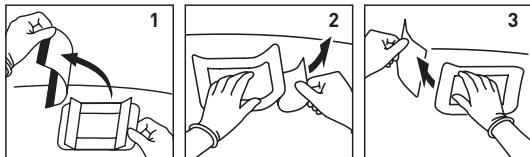

Für schwach  
exsudierende Wunden



Größe Wundauflage



Für mäßig  
exsudierende Wunden



Bei beschädigter  
Verpackung verwerfen



Für stark  
exsudierende Wunden



Medizinprodukt

# Mepilex® Border Flex Lite

Weicher, selbsthaftender, silikonbeschichteter Schaumverband

## Produktbeschreibung

Mepilex Border Flex Lite ist ein dünner, sehr anpassungsfähiger, selbsthaftender, absorbierender Verband, der ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält. Die wasserdichte äußere Schicht schützt die Wunde vor Schmutz und Bakterien. Der Verband verfügt über die selbsthaftende Wundkontaktschicht – die Safetac®Technologie. Die Wundkontaktschicht minimiert Schmerzen beim Patienten sowie Traumata von Wunden und der wundumgebenden Haut beim Entfernen des Verbands.

### Mepilex Border Flex Lite besteht aus:

- einer Wundkontaktschicht aus haftendem weichem Silikon (Safetac) und einer Trägerfolie
- einem flexiblen, aus zwei Schichten bestehenden Absorptionskissen: einem Schaum und einer weiterleitenden Vliesschicht, die unter Anwendung der Flex-Technologie perforiert ist.
- einer atmungsaktiven und wasserdichten äußeren Folie, die eine Barriere gegen externe Kontamination bietet

### Bestandteile des Verbandmaterials:

Silikon, Polyurethan, Polyacrylat, Viskose, Polyester und Polyolefin.

## Anwendung/Indikation

Mepilex Border Flex Lite ist für die Behandlung einer Vielzahl von nicht oder mäßig exsudierenden Wunden geeignet, darunter Bein- und Fußgeschwüre, Druckgeschwüre sowie traumatische Wunden wie Schürfwunden, Blasen und Hautrisse. Mepilex Border Lite kann außerdem als Schutz für gefährdete und/oder fragile Haut benutzt werden.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie Mepilex Border Flex Lite nicht bei Patienten und/oder Anwendern mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber den verarbeiteten Materialien/Bestandteilen des Produkts.

- Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln, wie z. B. Hypochloritlösungen oder Wasserstoffperoxid, verwenden.
- Wenn Sie Anzeichen einer Infektion feststellen, z. B. Fieber oder gerötete, warme, geschwollene Wunde bzw. wundumgebende Haut, müssen Sie für eine angemessene medizinische Behandlung medizinisches Fachpersonal hinzuziehen.
- Nicht wiederverwenden. Die Leistungsfähigkeit des Produkts kann bei Wiederverwendung eingeschränkt sein und es können Kreuzkontaminationen auftreten.
- Steril. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn die sterile Barriere beschädigt ist oder die Verpackung vor Gebrauch bereits geöffnet wurde. Produkt nicht resterilisieren.

### **Gebrauchsanweisung**

Mepilex Border Flex Lite kann unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal auch von Laien verwendet werden.

1. Reinigen Sie die Wunde gemäß den klinischen Standards.
2. Trocknen Sie die wundumgebende Haut gründlich.
3. Wählen Sie eine passende Verbandgröße aus. Das Wundkissen sollte die trockene Wundumgebung mindestens 1 bis 2 cm überlappen, um die umgebende Haut vor Mazeration zu schützen und eine sichere Fixierung des Verbands zu gewährleisten.
4. Entfernen Sie die erste Schutzfolie und legen Sie die haftende Seite auf die Wunde.
5. Entfernen Sie die restlichen Schutzfolien und streichen Sie den Verband auf der Haut glatt. Nicht überdehnen.

Das Intervall für den Verbandwechsel kann mehrere Tage betragen. Wechseln Sie den Verband, bevor er vollständig gesättigt ist, bei Anzeichen von Leckagen oder gemäß der klinischen Praxis.

- Mepilex Border Flex Lite kann auch unter Kompression verwendet werden.
- Außerdem eignet sich Mepilex Border Flex Lite auch für den Gebrauch in Kombination mit Gelen.

Die Entsorgung sollte gemäß den lokalen Umweltschutzbedingungen erfolgen.

### Weitere Informationen

Der in dem Produkt verwendete Polyurethanschaum kann eine gelbliche Farbe annehmen, wenn er Licht, Luft und/oder Hitze ausgesetzt wird. Der Farbwechsel hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften, wenn das Produkt vor dem Haltbarkeitsdatum verwendet wird. Falls ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit Mepilex Border Flex Lite aufgetreten ist, melden Sie dies an Mölnlycke Health Care.

Mepilex® und Safetac® sind eingetragene Warenzeichen der Mölnlycke Health Care AB.

**GERMANY** Mölnlycke Health Care GmbH

Grafenberger Allee 297

DE-40237 Düsseldorf

Tel: +49 211 92 08 80

Customer Service Tel: 0800 186 21 80



Master PD-590345 rev. 01

Issued 2020-06

**40899-01**

PD-571466 rev.01