

Produkttitel:

Onlysmile Zahnaufhellungsset (Starterkit)

Inhalt:

- 1x Onlysmile LED-Lampe
- 1x Onlysmile Zahnaufhellungsgel (40 ml)
- 1x Onlysmile Mundschiene
- 1x USB-C Ladekabel
- 1x Gebrauchsanweisung

PZN:

D: 20129322

A: 6006989

Strahlend weiße Zähne in wenigen Tagen – sicher. schmerzfrei. langanhaltend.

Das Zahnaufhellungsset von Onlysmile ist ein System aus unterschiedlichen hochwertigen Komponenten, die eine Zahnaufhellung von bis zu 9 Nuancen in nur 5 Tagen schmerzfrei ermöglicht. Das Set ist Klinisch getestet, in Deutschland von Zahnprofis entwickelt und Dermatest zertifiziert.

Das Onlysmile Zahnaufhellungsset kombiniert ein hochwertiges Peroxid-Gel mit einer speziell abgestimmten LED-Lichtquelle. Beim Auftragen setzt das Gel Sauerstoffradikale frei, die gezielt farbgebende Pigmente in der Zahnoberfläche zersetzen. Die LED-Lampe beschleunigt diesen Oxidationsprozess, sodass die Wirkstoffmoleküle schneller in den Zahnschmelz eindringen und Verfärbungen effektiv beheben.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Bis zu 9 Nuancen in nur 5 Tagen
- Sicher für das Zahnfleisch, Zahnschmelz und empfindliche Zähne
- Klinisch getestet
- Dermatest zertifiziert
- Entwickelt in Deutschland
- Einfache Anwendung
- Bis zu 10 Anwendungen (40 ml)
- Tierversuchsfrei
- Vegan

Entferne jahrealte Verfärbungen durch Kaffee, Tabak oder Wein und setze auf bewährte Premiumqualität!

Steigere dein Selbstbewusstsein – denn Schönheit beginnt mit einem strahlenden Lächeln!

Anwendungshinweise:

1. Lade die Lampe vor der Verwendung etwa 25 Minuten auf
2. Trage 4 ml Gel auf die obere und untere Seite der Mundschiene auf
3. Setze die Schiene in den Mund ein und schalte die Lampe ein
4. Wenn sich zu viel Speichel ansammelt, nimm die Lampe heraus und spucke ihn aus
5. Die Lampe geht nach Abschluss der Behandlung (45 Minuten) automatisch aus
6. Nimm die Schiene aus dem Mund und reinige sie.

Nach der Anwendung:

Wir empfehlen in den ersten 2 Stunden nur Wasser zu trinken und für 24 Stunden eine „weiße Diät“ einzuhalten, bei der auf farbige Lebensmittel (zb. Blaubeeren) und Getränke (zb. Tee, Kaffee) verzichtet wird. Außerdem sollte für mindestens 2 Stunden nicht geraucht werden.

Reinigung:

1. Reinige nach der Anwendung ausschließlich die Mundschiene mit Wasser
2. Verwende ein trockenes Tuch, um die Lampe sanft abzuwischen und sauber zu halten
3. Die Lampe sollte nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln gewaschen werden

Tipps:

- Für schnellere Ergebnisse 2x täglich über 5 Tage anwenden. Behandlungen können direkt nacheinander oder über den Tag verteilt werden
- Wenn dir 45 Minuten zu lang sind, probiere kürzere Sitzungen von 20 – 30 Minuten und führe sie dafür häufiger durch
- Wenn deine Zähne besondere Formen oder Positionen haben, empfehlen wir das Gel sowohl auf die Mundschiene als auch direkt auf die Zähne aufzutragen, um eine gleichmäßige Aufhellung zu garantieren
- In seltenen Fällen können kleine, weiße Flecken auf den Zähnen auftreten. Diese sind unbedenklich und verschwinden innerhalb von 1-2 Tagen vollständig

Warnhinweise:

Gel:

- Gel bitte nicht schlucken
- Bei unangenehmen Irritationen die Behandlung abbrechen und den Zahnarzt kontaktieren
- Kontakt mit den Augen vermeiden
- Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden
- Nicht für schwangere und stillende Frauen geeignet

Lampe:

- Von Wasser fernhalten
- Nicht direkt in die Lampe schauen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 460 – 465 nm
- NiMH Batterie Ladezeit: 1 Std.
- Lampe hergestellt in P.R.C.

Inhaltsstoffe:

Gel:

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonele, Linalool, Citral, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891

Enthält weniger als 0,1% Wasserstoffperoxid

Hersteller Adresse:

Only Kosmetik GmbH

Königsallee 27

40212 Düsseldorf

Deutschland