

Produkttitel:

Onlysmile Zahnaufhellungsgel 3er-Set (Zubehör)

Inhalt:

- 3x Zahnaufhellungsgel á 40ml
- Gebrauchsanweisung

PZN:

D: 20129345

A: 6007003

Strahlend weiße Zähne in wenigen Tagen – sicher. schmerzfrei. langanhaltend.

Das Onlysmile Zahnaufhellungsgel wurde speziell als Nachfüllprodukt für das Onlysmile Zahnaufhellungsset entwickelt und ermöglicht eine effektive, sichere und schmerzfreie Zahnaufhellung in den eigenen vier Wänden. Es verlängert die Nutzungsdauer des Sets und trägt dazu bei, das aufgehellte Erscheinungsbild der Zähne langfristig zu erhalten.

Die kosmetische Formulierung basiert auf einem aktiven Peroxid-Komplex, der beim Auftragen Sauerstoffverbindungen freisetzt. Diese wirken gezielt auf farbgebende Moleküle in oberflächlichen Verfärbungen ein – etwa durch Kaffee, Tee oder Tabak – und entfernen diese sanft. Die Anwendung erfolgt in Kombination mit einer Mundschiene, wodurch das Gel gleichmäßig verteilt wird und optimal wirken kann. Die Formel wurde speziell für empfindliche Zähne entwickelt und unterstützt eine schonende Zahnaufhellung ohne Reizungen oder Schmerzen.

Das Produkt ist klinisch getestet, dermatologisch geprüft (Dermatest-zertifiziert) und wird unter höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Bis zu 9 Nuancen hellere Zähne innerhalb von 5 Tagen
- Klinisch getestet, Dermatest-zertifiziert und von Zahnexperten entwickelt
- Made in Germany – geprüfte Qualität aus deutscher Herstellung
- Vegan, tierversuchsfrei und frei von schädlichen Inhaltsstoffen
- Geeignet für empfindliche Zähne – keine Schmerzen oder Reizungen
- Erfrischender Minzgeschmack für ein angenehmes Anwendungserlebnis
- Bis zu 10 Anwendungen pro Tube (40 ml)
- Kompatibel mit allen Zahnschienen und LED-Geräten

Geeignet für folgende Anwendergruppen:

- Personen, die bereits das Onlysmile Zahnaufhellungsset besitzen
- Anwender, die ihr Bleaching-Ergebnis regelmäßig auffrischen möchten
- Personen mit empfindlichen Zähnen, die eine sanfte und dennoch wirksame Zahnaufhellung bevorzugen

- Alle, die Wert auf einfache Anwendung und sichtbare Ergebnisse legen

Ein strahlendes Lächeln muss kein Zahnarztbesuch erfordern. Mit dem Onlysmile Zahnaufhellungsgel gelingt eine professionelle Zahnaufhellung sicher, sanft und bequem von zuhause aus.

Steigere dein Selbstbewusstsein – denn Schönheit beginnt mit einem strahlenden Lächeln!

Anwendungshinweise:

1. Trage 4 ml Gel auf die obere und untere Seite der Mundschiene auf
2. Setze die Schiene in den Mund und starte die Anwendung
3. Führe die Anwendung für 30 Minuten oder mehr aus
4. Wenn sich zu viel Speichel ansammelt, nimm die Lampe heraus und spucke ihn aus
5. Nimm die Schiene aus dem Mund.

Nach der Anwendung:

Wir empfehlen in den ersten 2 Stunden nur Wasser zu trinken und für 24 Stunden eine „weiße Diät“ einzuhalten, bei der auf farbige Lebensmittel und Getränke verzichtet wird. Außerdem sollte für mindestens 2 Stunden nicht geraucht werden.

Reinigung:

1. Reinige nach der Anwendung ausschließlich die Mundschiene mit Wasser
2. Verwende ein trockenes Tuch, um die Lampe sanft abzuwischen und sauber zu halten
3. Die Lampe soll nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln gewaschen werden

Tipps:

- Mit einem Aligner kannst du das Gel über Nachteinwirken lassen. So wird die Wirkzeit verlängert und das Ergebnis kann noch intensiver ausfallen.
- Das Gel lässt sich auch ohne Schiene, Aligner oder Lampe anwenden. Verwende einen Spiegel, um es direkt auf die Zähne aufzutragen.
- Für schnellere Ergebnisse 2x täglich über 5 Tage anwenden. Behandlungen können direkt nacheinander oder über den Tag verteilt werden
- Wenn deine Zähne besondere Formen oder Positionen haben, empfehlen wir das Gel sowohl auf die Mundschiene als auch direkt auf die Zähne aufzutragen, um eine gleichmäßige Verteilung zu garantieren
- In seltenen Fällen können kleine weiße Flecken auf den Zähnen auftreten. Diese sind unbedenklich und verschwinden innerhalb von 1-2 Tagen vollständig

Warnhinweise:

- Gel bitte nicht schlucken
- Bei unangenehmen Irritationen Behandlung abbrechen und Zahnarzt kontaktieren
- Kontakt mit den Augen vermeiden
- Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden
- Nicht für schwangere und stillende Frauen geeignet

Inhaltsstoffe:

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonele, Linalool, Citral, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891

Enthält weniger als 0,1% Wasserstoffperoxid

Hersteller Adresse:

Only Kosmetik GmbH

Königsallee 27

40212 Düsseldorf

Deutschland