

Produkttitel:

Onlysmile Mundschiene (Zubehör)

Inhalt:

- 1x Onlysmile Mundschiene

PZN:

D: 20133482

A: 6006972

Strahlend weiße Zähne in wenigen Tagen – sicher. schmerzfrei. langanhaltend.

Die Onlysmile Mundschiene wurde speziell als Nachfüllprodukt für das Onlysmile Zahnaufhellungsset entwickelt und ermöglicht eine effektive, sichere und schmerzfreie Zahnaufhellung in den eigenen vier Wänden. Es verlängert die Nutzungsdauer des Sets und trägt dazu bei, das aufgehellte Erscheinungsbild der Zähne langfristig zu erhalten.

Das Zahnaufhellungsset von Onlysmile ist ein System aus unterschiedlichen hochwertigen Komponenten, die eine Zahnaufhellung von bis zu 9 Nuancen in nur 5 Tagen schmerzfrei ermöglicht. Das Set ist klinisch getestet, in Deutschland von Zahnprofis hergestellt und Dermatest zertifiziert.

Das Onlysmile Zahnaufhellungsset kombiniert ein hochwertiges Peroxid-Gel mit einer speziell abgestimmten LED-Lichtquelle. Beim Auftragen des Gels auf der Mundschiene setzt es Sauerstoffradikale frei, die gezielt farbgebende Pigmente in der Zahnoberfläche zersetzen. Die LED-Lampe beschleunigt diesen Oxidationsprozess, sodass die Wirkstoffmoleküle schneller in den Zahnschmelz eindringen und Verfärbungen effektiv beheben.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Bis zu 9 Nuancen in nur 5 Tagen
- Sicher für das Zahnfleisch, Zahnschmelz und empfindliche Zähne
- Klinisch getestet
- Dermatest zertifiziert
- Entwickelt in Deutschland
- Einfache Anwendung
- Bis zu 10 Anwendungen (40 ml)
- Tierversuchsfrei
- Vegan

Entferne jahrealte Verfärbungen durch Kaffee, Tabak oder Wein und setze auf bewährte Premiumqualität!

Steigere dein Selbstbewusstsein – denn Schönheit beginnt mit einem strahlenden Lächeln!

Anwendungshinweise:

1. Lade die Lampe vor der Verwendung etwa 25 Minuten auf
2. Trage 4 ml Gel auf die obere und untere Seite der Mundschiene auf
3. Setze die Schiene in den Mund ein und schalte die Lampe ein
4. Wenn sich zu viel Speichel ansammelt, nimm die Lampe heraus und spucke ihn aus
5. Die Lampe geht nach Abschluss der Behandlung (45 Minuten) automatisch aus
6. Nimm die Schiene aus dem Mund und reinige sie.

Hersteller Adresse:

Only Kosmetik GmbH

Königsallee 27

40212 Düsseldorf

Deutschland